

WIDEX **ALLURE™**
UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA
SÉRIE WIDEX ALLURE™

APLIKACE ALLURE



WIDEX

SOUND LIKE NO OTHER

OBSAH

ZAČÍNÁME.....	4
Určené použití / určený účel.....	4
Kompatibilita.....	4
iOS.....	4
Android.....	4
Sluchadla.....	4
Nastavení.....	5
Instalace.....	5
Hodinky Apple Watch.....	5
Párování s iPhonem.....	6
Párování se zařízením Android.....	7
PŘI POUŽÍVÁNÍ APLIKACE.....	8
Přehled.....	8
Domovská obrazovka.....	9
Kontrola stavu baterie a připojení.....	9
Změna programů.....	10
Používání funkce AI Sound Assistant.....	10
Nastavení zvuku.....	12
Nastavení směrového zaměření.....	12
Používání funkce AI Quick Assistant.....	13

Použití ekvalizéru.....	14
Ukládání a resetování nastavení.....	15
Vytváření zkratk k funkcím pro nastavení zvuku.....	16
Nastavení a ztlumení hlasitosti zvuku.....	17
Streamování do vašich sluchadel.....	17
Nápověda.....	18
Nápověda.....	18
Více.....	18
Sekce Další.....	18
Nastavení sluchadla.....	18
Nastavení aplikace.....	19
Najít sluchadla.....	20
DALŠÍ INFORMACE.....	21
Symboly.....	21
Důležité symboly související s tímto dokumentem a aplikací.....	21
Důležité bezpečnostní informace.....	22
Získání fyzické kopie tohoto dokumentu.....	23

ZAČÍNÁME

Určené použití / určený účel

Aplikace ALLURE je příslušenství pro sluchadla. Aplikace umožňuje uživatelům sluchadel provádět úpravy jejich sluchadel bezdrátově. Aplikace je určena pro uživatele sluchadel na kompatibilních chytrých telefonech.

Kompatibilita

iOS

Aplikace ALLURE funguje na iPhonech s iOS verze 17 a vyšší a na hodinkách Apple Watch s watchOS verze 9 a vyšší.

Android

Aplikace ALLURE funguje na většině zařízení se systémem Android verze 10 a vyšší.

Zařízení podporující LE Audio a ASHA

Streamujte přímo do sluchadel ze zařízení se systémem Android pomocí protokolu LE Audio nebo ASHA (Audio Streaming for Hearing Aids).

Streamování přes LE Audio funguje na kompatibilních zařízeních se systémem Android verze 14 nebo vyšší.

Streamování přes ASHA funguje na kompatibilních zařízeních se systémem Android verze 11 nebo vyšší.

Sluchadla

Aplikace ALLURE je kompatibilní se sluchadly WIDEX ALLURE.

Nastavení

Instalace

Chcete-li nainstalovat a spustit aplikaci ALLURE ve smartphonu, postupujte takto:

1. Nainstalujte si bezplatnou aplikaci ALLURE z obchodu Apple App Store nebo Google Play Store.
 2. Na domovské obrazovce vyberte ikonu aplikace ALLURE.
 3. Přečtěte si obchodní podmínky.
 4. Pokud souhlasíte s podmínkami, vyberte možnost **Udělit souhlas**.
 5. Pokud aplikace požádá o povolení používat Bluetooth, povolte to.
- Po instalaci aplikace se ujistěte, že jsou vaše sluchadla spárována s vaším zařízením.

Hodinky Apple Watch

Chcete-li nainstalovat aplikaci ALLURE do hodinek Apple Watch, postupujte takto:

1. Nainstalujte si na svůj iPhone bezplatnou aplikaci ALLURE z obchodu Apple App Store.
2. Nainstalujte aplikaci do hodinek Apple Watch pomocí aplikace Watch v telefonu iPhone.

Ovládání aplikace z Apple Watch vám neumožňuje přístup ke všem funkcím aplikace. Pokud chcete využívat všechny funkce aplikace, použijte ji na svém iPhone.

Když ovládáte aplikaci z hodinek Apple Watch, můžete nastavit hlasitost sluchadel, ztlumit a zrušit ztlumení sluchadel, změnit programy a zkontrolovat stav baterie sluchadel.

Párování s iPhonem

Před spárováním sluchadel s iPhonem se ujistěte, že je v telefonu zapnutá funkce Bluetooth a že sluchadla mají nové nebo plně nabitě baterie.

Chcete-li spárovat sluchadla s iPhonem, postupujte takto:

1. Vyberte **Nastavení** na domovské obrazovce.
2. Vyberte možnost **Dostupnost**.
3. Vyberte položku **Sluchadla**.
4. Vypněte a znovu zapněte sluchadla. Tím se přepnou do režimu párování na 3 minuty.
5. Počkejte, až se název vašich sluchadel zobrazí pod nadpisem **Sluchadla MFi**.
6. Vyberte název svých sluchadel pod nadpisem **Sluchadla MFi**.
7. Počkejte, až se zobrazí vyskakovací okno s názvem **Žádost o spárování Bluetooth**.
8. Vyberte možnost **Spárovat** dvakrát – jednou pro každé sluchadlo.

Pokud se vedle názvu vašich sluchadel pod nadpisem **Sluchadla MFi** zobrazí slovo **Připojeno**, jsou vaše sluchadla spárována s vaším iPhonem.

Párování se zařízením Android

Před spárováním sluchadel se zařízením Android se ujistěte, že je v telefonu zapnutá funkce Bluetooth a že sluchadla mají nové nebo plně nabitě baterie.

Párování prostřednictvím nastavení telefonu

1. Vyberte **Nastavení** na domovské obrazovce.
2. Vyberte **Připojení**.
3. Zvolte možnost **Bluetooth**.
4. Vypněte a znovu zapněte sluchadla. Tím se přepnou do režimu párování.
5. Vyberte název svých sluchadel pod nadpisem **Dostupná zařízení**.
6. Když se zobrazí vyskakovací okno s názvem **Žádost o spárování Bluetooth**, vyberte možnost **Spárovat**.

Párování prostřednictvím aplikace


1. Na domovské obrazovce vyberte ikonu aplikace ALLURE.
2. Vyberte **Spárovat sluchadla**.
3. Vypněte a znovu zapněte sluchadla. Tím se přepnou do režimu párování.
4. Vyberte název svých sluchadel pod nadpisem **Dostupná sluchadla**.
5. Když se zobrazí vyskakovací okno s názvem **Žádost o spárování Bluetooth**, vyberte možnost **Spárovat**.
6. Vyberte možnost **Pokračovat**.

Vaše sluchadla jsou nyní spárována s vaším zařízením Android.

PŘI POUŽÍVÁNÍ APLIKACE

Přehled

1. Stav baterie/připojení
2. Aktivní program
3. Nabídka programu
4. Volitelné ikony zkratk
5. Nastavení zvuku
6. Posuvník hlasitosti
7. Ztlumit/Zrušit ztlumení
8. Nastavení hlasitosti levého/ pravého sluchadla
9. Navigační menu

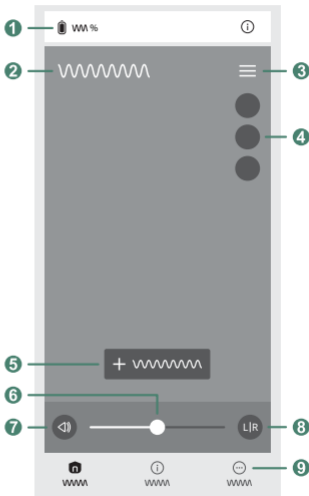

Domovská obrazovka

Domovská obrazovka je hlavní zobrazení aplikace. Zde můžete zkontrolovat stav baterie svých sluchadel, změnit a upravit aktivní poslechový program a nastavit zvukové parametry.

Kontrola stavu baterie a připojení

Stavová lišta v horní části **domovské** obrazovky zobrazuje úroveň nabití baterie a stav připojení vašich sluchadel.

- Pokud máte dvě sluchadla a obě jsou připojena, lišta zobrazuje úroveň nabití sluchadla s nejnižším stavem baterie.
- Pokud máte dvě sluchadla a připojeno je pouze jedno, na liště se zobrazí varování, že druhé sluchadlo není připojeno.
- Pokud máte jedno sluchadlo a je připojeno, lišta zobrazuje úroveň nabití baterie tohoto sluchadla.




Když klepnete kdekoli na liště, zobrazí se stránka **Stav**.

Stránka **Stav** zobrazuje podrobné informace o každém sluchadle, včetně informace o tom, jak dlouho vydrží zbývající nabití baterie. Ve spodní části stránky **Stav** je zobrazen odkaz na průvodce připojením. Pokud nejsou vaše sluchadla správně spárována s vaším zařízením nebo máte problémy s připojením, klepněte na tento odkaz a zobrazí se pokyny.

Změna programů

Na **domovské** obrazovce se název aktuálně spuštěného programu zobrazuje na levé straně pod stavovou lištou. Chcete-li změnit aktivní program, klepněte na ikonu se třemi vodorovnými čarami na pravé straně obrazovky.

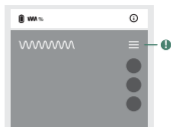

Po klepnutí na ikonu se zobrazí stránka **Programy**.

Na stránce **Programy** se zobrazuje seznam uložených programů pro poslech, včetně vašich osobních programů. Klepnutím na tři tečky vedle názvu programu získáte další informace a možnosti. Klepnutím na název programu ho aktivujete. Klepněte na tlačítko **Zavřít** v pravém horním rohu obrazovky a vraťte se na **domovskou** obrazovku.

Ve spodní části stránky **Programy** se zobrazuje odkaz na funkci AI Sound Assistant. Pokud si chcete přizpůsobit poslechový zážitek a vytvořit si osobní program s pomocí funkce AI Sound Assistant, klepněte na tento odkaz.

Používání funkce AI Sound Assistant

Funkce AI Sound Assistant vám umožňuje vytvářet vlastní osobní programy s pomocí umělé inteligence. Chcete-li použít funkci AI Sound Assistant, postupujte takto:

1. Na **domovské** obrazovce klepněte na ikonu se třemi vodorovnými čarami v pravém horním rohu obrazovky. Otevře se stránka **Programy**.
2. Přejděte na konec stránky a klepněte na odkaz **AI Sound Assistant**.

3. Vyberte svou aktuální činnost z možností zobrazených na obrazovce. Pokud žádná z činností přesně neodpovídá tomu, co děláte, vyberte tu, která se nejvíce blíží tomu, co děláte.
4. Z možností zobrazených na obrazovce vyberte typ zvuku, pro který chcete optimalizovat poslechový zážitek.
5. Klepněte na tlačítko **Start** v dolní části obrazovky. Aplikace zobrazuje dva pruhy označené **A** a **B**.
6. Klepněte na lištu označenou **A** a poslechněte si první sadu nastavení zvuku.
7. Klepněte na lištu označenou **B** a poslechněte si další sadu nastavení zvuku. Aplikace zobrazuje posuvník s ikonou, která vypadá jako obličej.
 1. Pokud byla druhá sada nastavení zvuku horší než první sada, posuňte obličej do levé části posuvníku.
 2. Pokud byla druhá sada nastavení zvuku lepší než první sada, posuňte obličej na pravou stranu posuvníku.
 3. Pokud žádná ze dvou sad nastavení zvuku nebyla lepší než ta druhá, nechte obličej uprostřed.
8. Klepněte na tlačítko **Pokračovat** v dolní části obrazovky.
9. Opakujte proces porovnávání různých sad nastavení zvuku, dokud AI Sound Assistant neurčí nejlepší nastavení pro vás.
10. Klepněte na tlačítko **Uložit** v dolní části obrazovky.
11. Zadejte název nového poslechového programu.
12. Klepněte na tlačítko **Hotovo** v pravém horním rohu obrazovky. Vráťte se na stránku **Programy** a váš nový osobní program se zobrazí v sekci **Osobní programy**.

Nastavení zvuku

Na **domovské** obrazovce je uprostřed tlačítko s názvem **Nastavení zvuku**. Po klepnutí na tlačítko se zobrazí následující funkce:

- Funkce **směrové zaměření** vám umožňuje vybrat směr, na který se vaše sluchadla zaměří.
- Funkce **AI Quick Assistant** vám umožňuje rychle upravit aktuální nastavení zvuku tak, aby vyhovovalo vaší činnosti.
- Funkce **Ekvalizér** vám umožňuje nastavit hlasitost konkrétních frekvencí.

Nastavení směrového zaměření

Funkce směrového zaměření vám umožňuje vybrat směr, na který se vaše sluchadla zaměří. Pokud se nacházíte v hlučném prostředí a posloucháte někoho, kdo mluví přímo před vámi, směrové zaměření vám umožní upřednostnit a zesílit zvuky přicházející přímo před vámi. Zvuky přicházející z jiných směrů budou méně výrazné. Podobně, pokud s vámi někdo mluví z levé strany, směrové zaměření vám umožní upřednostnit a zesílit zvuky přicházející z levé strany.

Směrové zaměření funguje pouze tehdy, když je aktivní program **Univerzální**.



Chcete-li povolit směrové zaměření, postupujte takto:

1. Na **domovské** obrazovce klepněte na tlačítko **Nastavení zvuku**.
2. Klepněte na možnost **Směrové zaměření**.
3. Klepněte na směr, na který se chcete zaměřit: zepředu, zezadu, zleva nebo zprava. Vybraný směr je zvýrazněn.
4. Klepněte na tlačítko **Zavřít** v pravém horním rohu obrazovky a vraťte se na **domovskou** obrazovku.

Používání funkce AI Quick Assistant

Funkce AI Quick Assistant vám umožňuje rychle upravit aktuální nastavení zvuku tak, aby vyhovovalo vaší činnosti. Chcete-li použít funkci AI Quick Assistant, postupujte takto:

1. Na **domovské** obrazovce klepněte na tlačítko **Nastavení zvuku**.
2. Klepněte na možnost **AI Quick Assistant**.
3. Klepněte na aktivitu, která nejlépe odpovídá vaší aktuální činnosti. Nastavení zvuku se upraví podle vašeho výběru.
4. Klepněte na tlačítko **Hotovo** v pravém horním rohu obrazovky a vraťte se na **domovskou** obrazovku.

Použití ekvalizéru

Ekvalizér umožňuje nastavit hlasitost konkrétních frekvencí: nízkých, středních a vysokých.

Zvýšením nebo snížením hlasitosti konkrétních frekvencí změníte svůj poslechový zážitek.



- Když zvýšíte hlasitost nízkých frekvencí, někdy nazývaných basy, často tím zlepšíte zážitek z poslechu hudby nebo sledování filmů. Když snížíte hlasitost těchto frekvencí, často tím snížíte i hlasitost vlastního hlasu a dechu.
- Když zvýšíte hlasitost středních frekvencí, často se vám lépe rozumí lidem, když mluví. Když snížíte hlasitost těchto frekvencí, často selepší váš zážitek z poslechu hudby nebo sledování filmů.
- Když zvýšíte hlasitost vysokých frekvencí, někdy nazývaných výšky, často tím zvýšíte úroveň detailů ve zvuku, který slyšíte. Když snížíte hlasitost těchto frekvencí, zvuk, který slyšíte, často zní méně ostře a nepřirozeně.

Chcete-li pomocí ekvalizéru upravit hlasitost konkrétních frekvencí, postupujte takto:

1. Na **domovské** obrazovce klepněte na tlačítko **Nastavení zvuku**.
2. Klepněte na možnost **Ekvalizér**.
3. Chcete-li provést rychlé úpravy, klepněte na jednu ze čtyř předvoleb: více řeči, větší srozumitelnost, méně ostré nebo méně ozvěny.
4. Pro přesné nastavení posuňte prstem tři malé kruhy na grafu nahoru nebo dolů.
5. Klepněte na tlačítko **Hotovo** v pravém horním rohu obrazovky a vraťte se na **domovskou** obrazovku.

Ukládání a resetování nastavení

Když upravíte nastavení zvuku změnou hlasitosti nebo pomocí směrového zaměření, funkce AI Quick Assistant nebo ekvalizéru, **Nastavení zvuku** na **domovské** obrazovce se nahradí třemi novými možnostmi.



1. Chcete-li přistupovat k funkcím směrového zaměření, AI Quick Assistant a ekvalizéru, klepněte na nové tlačítko **Nastavení zvuku**.
2. Chcete-li uložit své úpravy jako osobní program, postupujte takto:
 1. Klepněte na tlačítko **Uložit jako**.
 2. Zadejte název nového programu.
 3. Klepněte na tlačítko **Uložit** v pravém horním rohu obrazovky.

3. Chcete-li odstranit provedené úpravy a obnovit předchozí nastavení zvuku, postupujte takto:
 1. Klepněte na tlačítko **Resetování úpravy**. Zobrazí se malé okno se dvěma tlačítky.
 2. Klepněte na tlačítko **Resetovat**.

Vytváření zkratk k funkcím pro nastavení zvuku

Můžete vytvořit zkratky pro funkce nastavení zvuku, které se zobrazí na **domovské** stránce.

Chcete-li vytvořit zkratku pro jednu z funkcí, postupujte takto:



1. Na **domovské** obrazovce klepněte na tlačítko **Nastavení zvuku**.
2. Klepněte na ikonu hvězdičky vedle funkce, pro kterou chcete vytvořit zkratku. Zobrazí se malé okno se dvěma tlačítky.
 1. Chcete-li přidat zástupce na **domovskou** obrazovku, klepněte na tlačítko **Přidat zkratku**. Na pravé straně **domovské** obrazovky se zobrazí ikona.
 2. Chcete-li se vrátit zpět bez přidání zástupce na **domovskou** obrazovku, klepněte na tlačítko **Zrušit**.

Nastavení a ztlumení hlasitosti zvuku

V dolní části obrazovky **Domů** se nachází lišta pro ovládání hlasitosti.



- Chcete-li zvuk ztlumit nebo zrušit ztlumení, klepněte na ikonu ztlumení na levé straně lišty ovládání hlasitosti.
- Chcete-li současně zvýšit nebo snížit hlasitost obou sluchadel, posuňte malý kruh na posuvníku hlasitosti doprava nebo doleva.
- Chcete-li ovládat hlasitost každého sluchadla samostatně, klepněte na tlačítko **L|R** na pravé straně lišty pro ovládání hlasitosti. Zobrazují se samostatné posuvníky hlasitosti a tlačítka pro ztlumení sluchadel.
- Chcete-li samostatně zvýšit nebo snížit hlasitost sluchadel, posuňte malý kruh na samostatných posuvnících hlasitosti nahoru nebo dolů.

Streamování do vašich sluchadel

Když streamujete z telefonu do sluchadel, aplikace automaticky přejde do režimu streamování.

Když je aplikace v režimu streamování, lišta pro ovládání hlasitosti na **domovské** obrazovce zobrazuje dva samostatné posuvníky hlasitosti: jeden pro hlasitost streamovaného zvuku a druhý pro hlasitost okolního zvuku. Posuňte posuvníky doleva nebo doprava a nastavte dvě úrovně hlasitosti.

Nastavení zvuku provedená během streamování se automaticky ukládají a aplikují se při každém spuštění streamování.

Nápověda

Nápověda

Sekce **Nápověda** je knihovna informací o aplikaci a vašich sluchadlech. Chcete-li použít sekci **Nápověda**, postupujte takto:

1. Klepněte na prostřední ikonu na navigační liště v dolní části obrazovky.
2. Klepněte na téma, o kterém se chcete dozvědět více.
3. Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Více

Sekce Další

V sekci **Další** můžete upravit nastavení Bluetooth a Call Control, nastavit denní připomenutí, abyste si nasadili sluchadla, a používat funkci **Najít sluchadla**. Chcete-li použít sekci **Další**, postupujte takto:

1. Klepněte na ikonu vpravo na navigační liště v dolní části obrazovky.
2. Klepněte na název možnosti, kterou chcete zobrazit.

Nastavení sluchadla

Stránka **Nastavení sluchadel** obsahuje následující dvě nastavení:

- Nastavení **Bluetooth sluchadel** vám umožňuje deaktivovat komunikaci Bluetooth se sluchadly. Chcete-li Bluetooth vypnout, klepněte v této části na tlačítko **Vypnout Bluetooth**. Pokud je Bluetooth deaktivováno, restartujte sluchadla, aby se Bluetooth znovu aktivovalo.

- Nastavení **Call Control** umožňuje zapnout a vypnout funkci Call Control. Když je funkce Call Control zapnutá, dvojitým klepnutím prstem na jedno ze sluchadel můžete přijímat a ukončovat telefonní hovory. Chcete-li povolit nebo zakázat funkci Call Control, klepněte na oválné tlačítko v této části. Tato funkce je k dispozici pouze na zařízeních iPhone.

Nastavení aplikace

Stránka **Nastavení aplikace** obsahuje následující dvě nastavení:

- Nastavení **Vzhled** vám umožňuje vybrat si mezi světlým a tmavým barevným schématem. Klepněte na barevné schéma, které chcete použít, nebo klepněte na **Systém**, aby aplikace přizpůsobila barevné schéma rozhraní vašeho telefonu.
- Nastavení **Připomenutí nasazení sluchadel** vám umožňuje nastavit denní připomenutí, abyste si nasadili sluchadla. Chcete-li upravit nebo nastavit připomenutí, postupujte takto:
 1. Klepněte na čas dne vlevo.
 2. Posuňte hodiny nahoru nebo dolů, abyste nastavili hodinu.
 3. Posuňte minuty nahoru nebo dolů, abyste nastavili minuty.
 4. Klepněte na **Hotovo**.
 5. Pokud připomenutí není zapnuté, klepněte na oválné tlačítko vpravo, abyste jej zapnuli. Pokud aplikace požádá o povolení k zobrazení oznámení, dejte jí toto povolení.

Najít sluchadla

Funkce **Najít sluchadla** vám umožní najít sluchadla, pokud jste je ztratili. Chcete-li vyhledat své sluchové pomůcky, postupujte takto:

1. V sekci **Další** klepněte na možnost **Najít sluchadla**.
2. Podívejte se na mapu a najděte barevné značky pro vaše sluchadla.
 1. Mapu můžete posouvat tak, že na ni klepnete a táhnete ji libovolným směrem.
 2. Přibližujte a oddalujte obraz přitahováním prstů na obrazovce.






Pokud nemůžete najít své sluchové pomůcky pomocí mapy, postupujte následovně:

1. Klepněte na jedno z tlačítek **Hledat** v pravé dolní části obrazovky. Uprostřed obrazovky se zobrazí kruh.
2. Pohybuje se a hledejte vybrané sluchadlo.
 1. Když se přiblížíte ke sluchadlu, kruh se zmenší.
 2. Když se vzdálíte od sluchadla, kruh se zvětší.
3. Přepínáte mezi sledováním levého a pravého sluchadla klepnutím na ikony v dolní části obrazovky.

DALŠÍ INFORMACE

Symboly

Důležité symboly související s tímto dokumentem a aplikací

Symbol	Popis
	Značka CE Označuje, že výrobek splňuje požadavky evropských směrnic o označování CE.
	Výrobce Zobrazuje se vedle názvu a adresy zákonného výrobce produktu.
	Zdravotnické zařízení Vyjádření, že se jedná o zdravotnické zařízení.

Společnost WSAUD A/S prohlašuje, že výrobek splňuje požadavky nařízení EU o zdravotnických prostředcích 2017/745. Úplné znění prohlášení o shodě je k dispozici na adrese **www.wsaud.com** nebo u výrobce.

Důležité bezpečnostní informace

Kontraindikace, zbytková rizika, shrnutí bezpečnosti a klinické účinnosti

Aplikace je příslušenství pro sluchadla.

Indikace a kontraindikace pro používání aplikace vycházejí z indikací a kontraindikací kompatibilních sluchadel.

Výrobce neuvádí žádné klinické přínosy aplikace jako samostatného produktu. Konkrétní klinické výhody používání aplikace vyplývají z klinických výhod kompatibilních sluchadel.

Samotná aplikace neobsahuje žádná zbytková rizika, protože umožňuje pouze personalizaci a nastavení komfortních funkcí kompatibilních sluchadel v omezeném rozsahu stanoveném sluchadly.

V případě závažného incidentu nahlase událost výrobcí přístroje a příslušnému orgánu, v jehož jurisdikci má uživatel a/nebo pacient bydliště.

Poznámka

- K bezpečnému používání této aplikace není třeba žádné další školení.
- Pokud narazíte na problémy s připojením aplikace k vašemu sluchadlu, obraťte se na svého odborníka na sluch.
- Zamkněte telefon pomocí PIN kódu a/nebo otisku prstu nebo rozpoznání obličeje a nastavte telefon tak, aby se automaticky zamykal.

Získání fyzické kopie tohoto dokumentu

Chcete-li získat tištěnou kopii tohoto dokumentu, navštivte stránku **www.wsaud.com**. Na vaši žádost vám bude do sedmi kalendářních dnů zaslána papírová kopie.

Widex PRAHA

Boudníkova 2538/11

180 00 Praha 8

Tel: 286 580 429

praha@wsa.com

Widex BRNO

Hlinky 995/70

603 00 Brno

Tel: 543 331 630

brno@wsa.com

Widex OSTRAVA

Biskupská 3330/8

702 00 Ostrava

Tel: 597 317 597

ostrava@wsa.com

www.widex.cz**WSAUD A/S**

Nymoellevej 6, DK-3540 Lynge, Dánsko

www.widex.com**Návod č.:**

9 514 1009 020 01

Vydáno:

2025-10

