

# DQ5A オーディオD/A変換器 取扱説明書

## ■ DQ5A同梱物


- ・ DQ5A本体
- ・ 電源用USBケーブル (USB-A – マイクロUSB)

## ■ お客様にご用意いただくもの

- ・ TVと接続する光デジタルケーブル
- ・ USB出力(5V/200mA以上)のACアダプター\*


\* TVにUSB出力がある場合は不要です。

## ■ 各部の名称

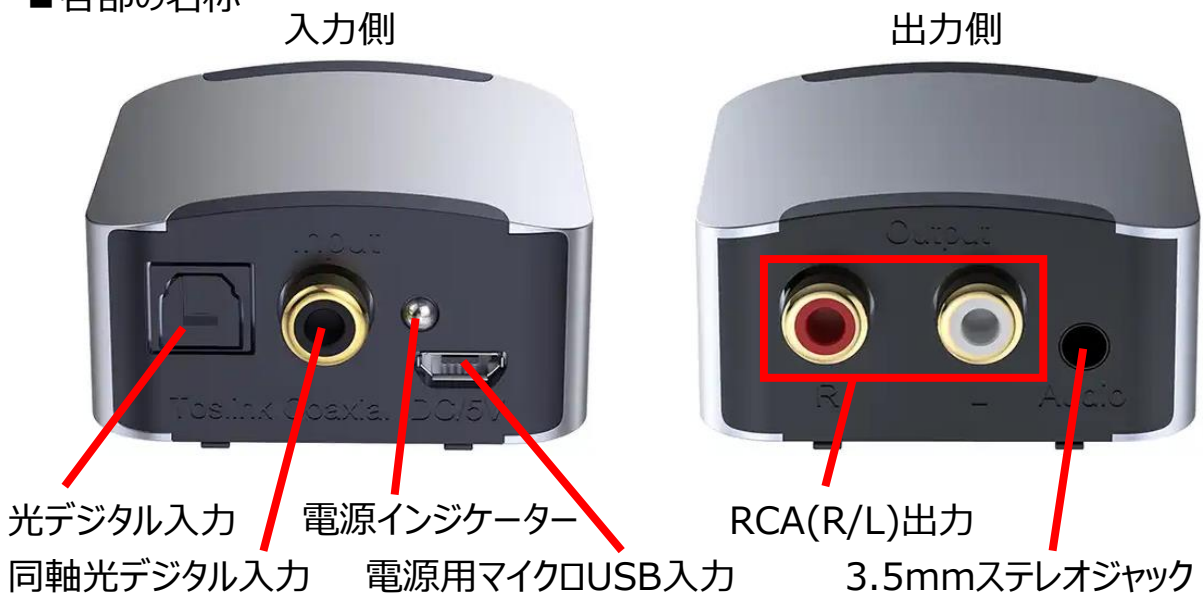

## ■ 接続方法

- ① TVの光デジタル出力と本機を光デジタルケーブルで接続します。
- ② 本機とRCA出力または3.5mmステレオジャックとTV-DEXのTV端子をTV-DEX付属のケーブルで接続します。
- ③ 本機の電源用マイクロUSB入力とTVまたはACアダプターのUSB出力を付属のUSBケーブルで接続します。
- ④ 本機の電源インジケータが点灯していることを確認します。

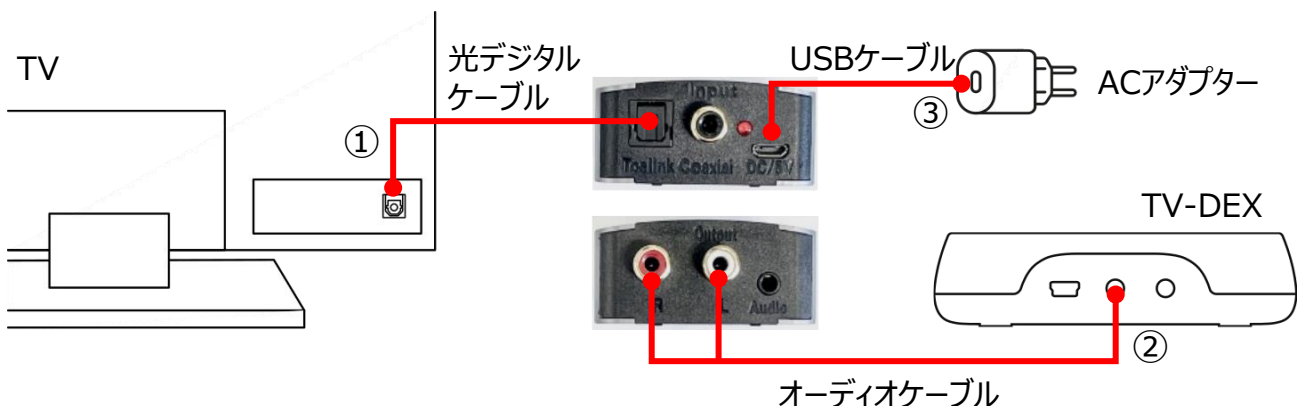

⑤ TVの出力設定を「PCM出力」に変更します。


例1) ソニー ブラビアの場合



例2) シャープ アクオスの場合



例3) パナソニック ビエラの場合

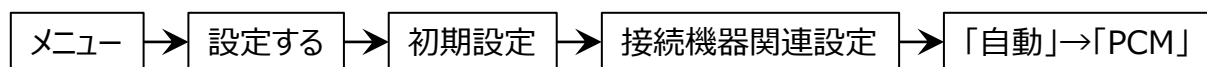

※上記のテレビでも、発売時期などで項目や設定の有無が変わる場合があります。

## ■ DQ5A製品仕様

### インターフェース

---

入力端子	光デジタル入力/RCA(同軸)デジタル入力
出力端子	RCA(L/R)出力/3.5mmステレオジャック

### 電源

---

電源供給	USBケーブルによる供給
消費電力	DC 5V/200mA

### 外形

---

筐体素材	アルミニウム
筐体色	グレー
寸法(W×H×D)	75 × 55 × 20mm
重量	30g