


COM-DEXの使い方 <アプリ編>

WIDEX

2022年 12月改訂

各部名称・付属品

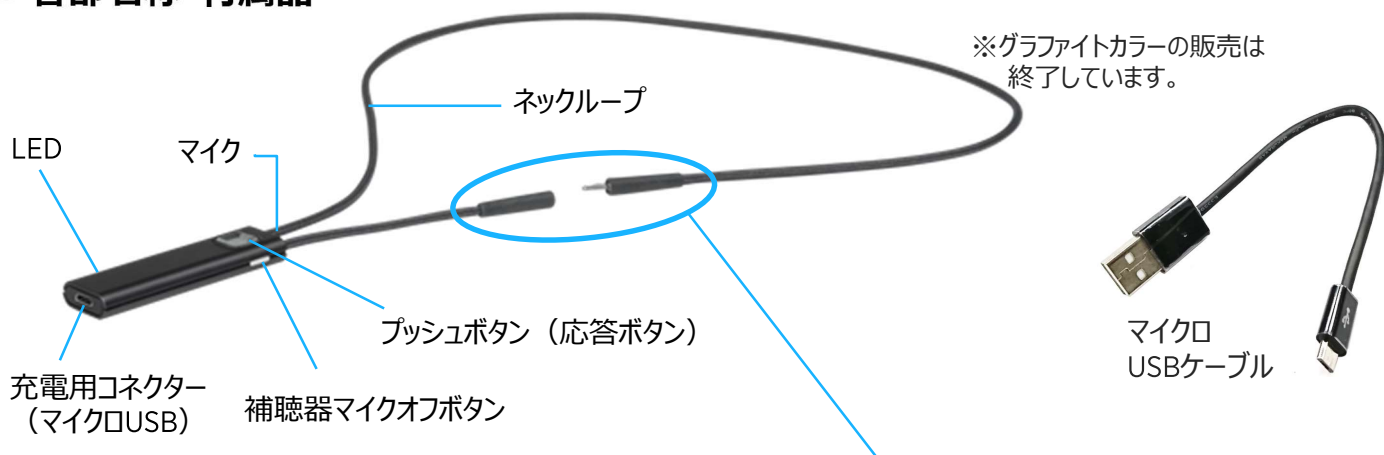

COM-DEXのネックループは電源の入(オン)・切(オフ) スイッチを兼ねています。
ネックループをつなぐと電源が入り、ループを外すと電源が切れます。

※COM-DEXを充電するときは、電源を切ってください。

電源オフ

電源オン

COM-DEXアプリ動作確認OS

- Apple端末：iOS8～9以降の全てのApple端末に対応しています。
- Android OS 4.4以降のほとんどのAndroid端末に対応しています。

COM-DEXアプリのダウンロード


COM-DEXを経由して補聴器のプログラム切り替えやボリューム調整をする場合にCOM-DEXアプリをお使いのスマートフォンにダウンロードして使用します。また、音楽のストリーミングや電話通話のみの場合は、COM-DEXアプリは必要ありません。また、COM-DEXとスマートフォンのペアリング方法は、別紙「COM-DEXの使い方 <電話編>」をご覧ください。

iPhoneの場合

1. ホーム画面の「App Store」をタップします。



2. 「検索」をタップします。

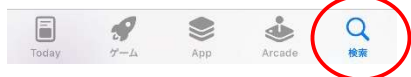

3. 検索ワードに「widex」と入力し、検索します。




4. 「入手」をタップします。



5. インストール後、「開く」ボタンをし、COM-DEXアプリを起動します。



2回目以降の起動は、ホーム画面の「COM-DEX」アイコンから起動します。

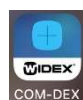

Androidの場合

① 「Playストア」をタップして、「Googleプレイ」画面を表示します。



② 検索ワードに「widex」と入力し、検索します。



③ 「インストール」をタップします。



④ 「開く」ボタンで、COM-DEXアプリを起動します。



2回目以降の起動は、アプリ一覧の「COM-DEX」アイコンから起動します。

※ COM-DEXのショートカットをホーム画面に追加しておくと便利です。




● COM-DEXアプリ画面

● COM-DEXアプリの起動

1. ホーム画面の「COM-DEX」アイコンから起動します。



2. ペアリング済みのCOM-DEXが表示されます。COM-DEXをタップします。

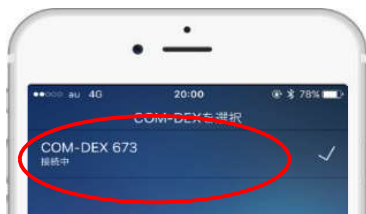

ボタンで音量を上げます。



ボタンで音量を下げます。



通信中はマイク入力が表示され、補聴器のマイクのオフ・オンができます。

プログラム切り替え画面




フリーフォーカス画面



詳細画面



 ボタンを押すごとに次のプログラムに切り替わります。
(補聴器にプログラム設定がされている場合)

「聞きたい方向を選択」をタップすると「フリーフォーカス」画面になります。聞きたい方向を選択します。

ヘルプやCOM-DEXの電池残量の確認、壁紙の変更などできます。

※CICは前後は選択できません。

※片耳装用の場合、左右は選択できません。

リモコン操作ができるようになるまでに**数秒から1分程度かかる場合があります。**

COM-DEX本体の正面ボタンを押すことで接続される場合があります。



● COM-DEXアプリのアップデート

COM-DEXアプリの新しいバージョンが公開されると、スマートフォンに通知が送られますので、アプリを更新してください。

※自動的に更新される場合もあります。

COM-DEXアプリが新しいバージョンへ更新された後で、動作に問題が生じた場合は、COM-DEXをお求めいただいた店舗へご相談ください。COM-DEX本体のソフトウェアを更新する場合があります。