



COM-DEXの使い方 <電話編>

各部名称・付属品

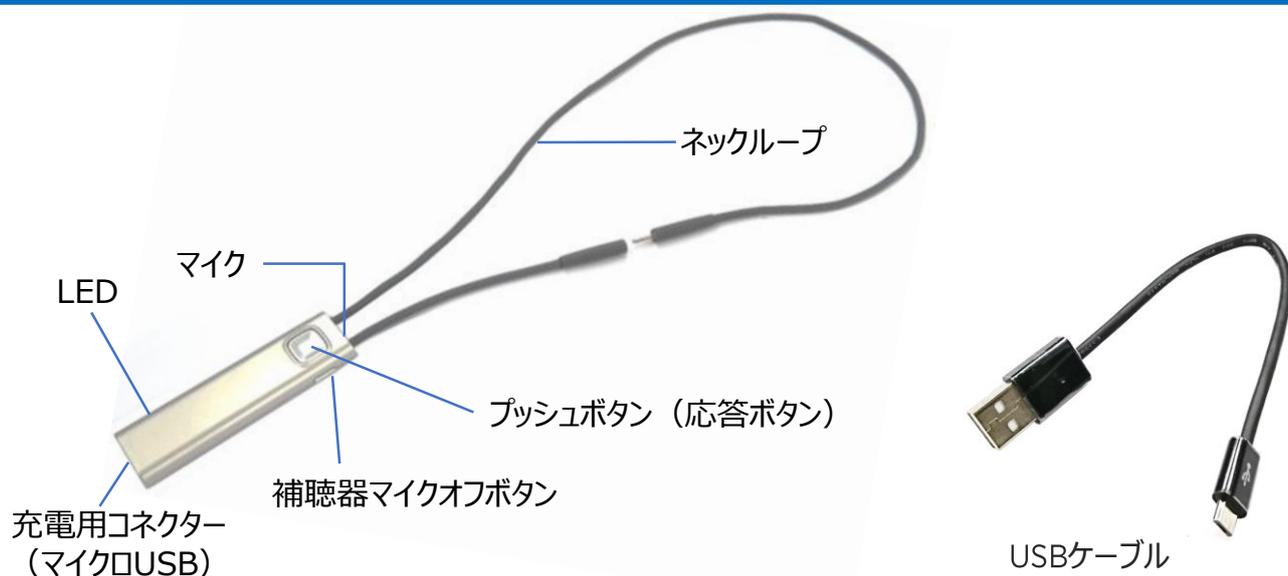

使用目的

スマートフォンとBluetoothで接続することで、ハンズフリー通話や音楽の転送ができます。また、COM-DEX専用アプリを使うことで、スマートフォンの画面で、補聴器のボリューム操作やプログラム切り替えができます。

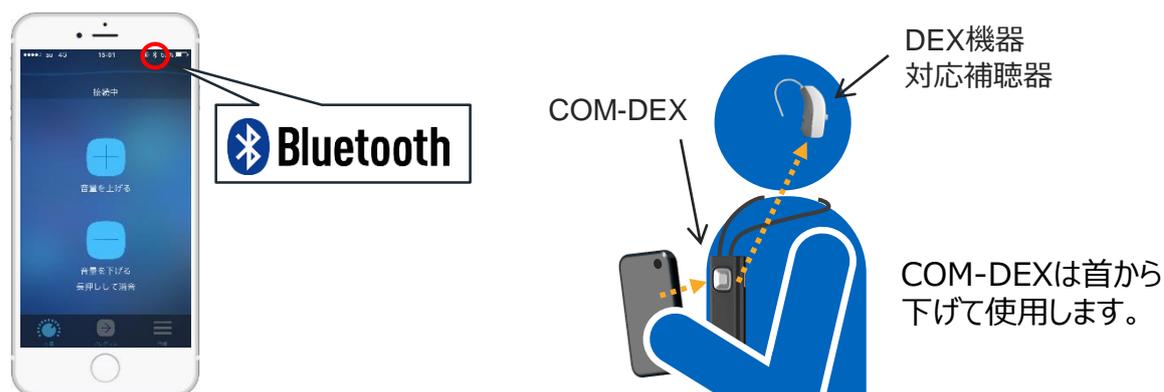

！ お手入れの方法は？ 注意することは？

お手入れの際は、乾いたやわらかい布で拭いてください。けって水や洗剤・化学品を使用したり、液体に浸さないでください。

高温多湿の場所での使用・保存は避けてください。

使用しないときは、子供およびペットの手の届かない涼しく湿度の低い場所に保管してください。

絶対にご自分で分解、または修理しようとししないでください。

お使いになる前に


COM-DEXの電源の入れ方・切り方

ネックループは電源の入(オン)・切(オフ) スイッチを兼ねています。


ケーブルをつなぐと電源が入ります。

ケーブルを外すと電源が切れます。

※COM-DEXを充電するときは、電源を切ってください。

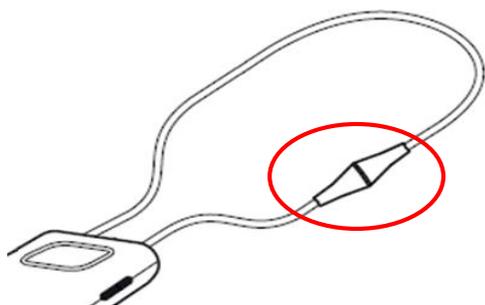

COM-DEX電源オン

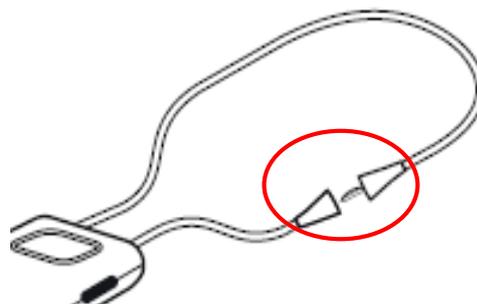


COM-DEX電源オフ

COM-DEXの充電

1. COM-DEXのネックループを外します。
2. 付属のUSBケーブルをCOM-DEXに取り付けます。
3. 付属のUSBケーブルの反対側をパソコンやUSB充電器(別売)に取り付けます。

USB充電器をお使いの場合は、コンセントに取り付け充電します。

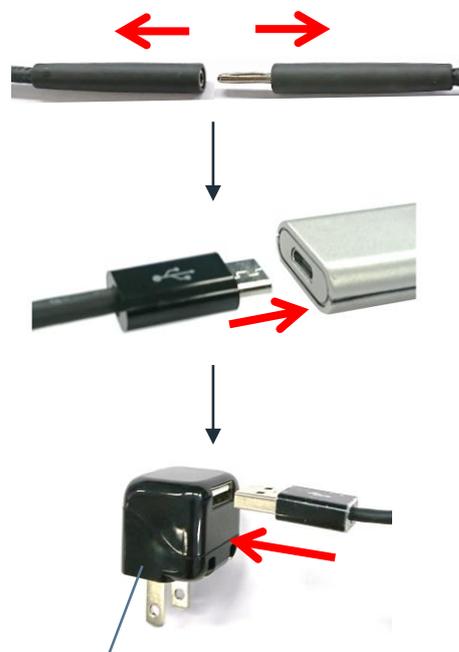

USB充電器(別売)

※ USB充電器は、市販のスマートフォン用、またはDRY-GO UVに付属されているものもお使いいただけます。

! 充電中はLEDランプでお知らせ

赤は充電中



緑になったら充電完了



充電後、装置を使用する前に、USBケーブルを取り外してください。約3時間の充電で、約8時間お使いいただけます。

スマートフォンとのペアリング (iPhone)

アンドロイドは次のページをご覧ください。

1. ホーム画面の「 設定」アイコンをタップします。



2. 「 Bluetooth」をタップします。



3. 「Bluetooth」のスイッチをタップし、Bluetoothをオンにします。




4. COM-DEXのネックループを接続し、COM-DEXをオンにします。

※COM-DEXと充電用ケーブルは外してください。



COM-DEX本体側面のLEDランプが赤・青の交互に点滅していることを確認してください。

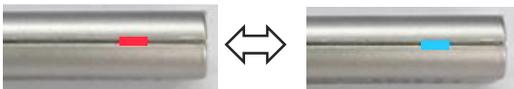

5. COM-DEXをタップします。



COM-DEXが「接続済み」になればペアリング完了です。

! COM-DEXが表示されない場合

- COM-DEXの充電が終わってから作業を行います。
- COM-DEXから充電用ケーブルを外します。
- iPhoneのBluetoothを一度オフにし、少し経ってから再度オンにして試します。
- COM-DEXを一度オフにし、少し経ってから再度オンにして試します。
- Bluetoothをオンにできない、または回転するギアマークが表示される場合は、iPhoneを再起動してみます。

COM-DEXがiPhoneにBluetooth接続されているかどうかの確認

iPhone画面に、ヘッドホンのアイコンが表示されていればOKです。



ヘッドホンのアイコンが消えて、グレーのBluetoothアイコンに変わっているときは、COM-DEXと接続されていません。



スマートフォンとのペアリング (Android)

iPhoneは前のページをご覧ください。

1. 「設定」アイコンをタップします。



！ 設定アイコンが見つからない場合

設定アイコンの表示方法は、お使いのUI（ホーム）設定によって変わります。画面下部の「田」や「⋮」アイコンをタップすると表示されます。

！ COM-DEXが表示されない場合

- COM-DEXの充電が終わってから作業を行います。
- COM-DEXから充電用ケーブルを外します。
- スマートフォンのBluetoothを一度オフにし、少し経ってから再度オンにして試します。
- COM-DEXを一度オフにし、少し経ってから再度オンにして試します。
- Bluetoothをオンにできない場合は、スマートフォンを再起動してみます。


2. 「Bluetooth」をタップします。



COM-DEXがスマートフォンにBluetooth接続されているかどうかの確認

スマートフォン画面に、Bluetoothデバイスと接続中アイコンが表示されていればOKです。スマートフォンにより表示アイコンは異なります。ご使用のスマートフォンの取扱説明書をご確認ください。

3. 「Bluetooth」のスイッチをタップし、Bluetoothをオンにします。

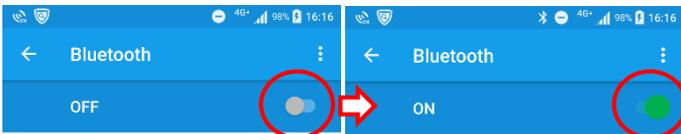

< ステータスバー表示例 >



4. COM-DEXのネックループを接続し、COM-DEXをオンにします。



※COM-DEXと充電用ケーブルは外してください。

- Bluetoothデバイスと接続中のアイコン例 -



Bluetoothのマークの横に ◆ ◆ や ▶ ◀ が表示され接続中であることを表現していたり、Bluetoothのマークがはっきりと表示されるようになっています。

5. COM-DEXをタップします。



COM-DEXが「接続済み」になればペアリング完了です。

Bluetoothのマークの横の ◆ ◆ や ▶ ◀ が消えたアイコンや グレー表示に変わっているときは、COM-DEXと接続されていません。

- Bluetoothはオンだが、未接続時のアイコン例 -



COM-DEXによる電話通話

！ 使用上の注意

- アプリは一切使用しません。
- 電話の着信は、COM-DEXのボタンで行います。
- 通話時の音量設定は、スマートフォンのボリュームで調節します。

電話がかかってきたとき

1. スマートフォンに着信したら、COM-DEXのプッシュボタンを押し、電話にでます。✖
2. 通話中は、COM-DEXのマイクに話しかけます。
3. 電話が終わったら、COM-DEXのプッシュボタンで電話を切ります。

✖ スマートフォン画面で応答すると、スマートフォンのスピーカーから音が出て 補聴器で聞こえない可能性があります。



< 着信・終話 >

電話をかけるとき

1. スマートフォンで、電話をかけます。
2. 通話中は、COM-DEXのマイクに話しかけます。
3. 電話が終わったら、COM-DEXのプッシュボタンで電話を切ります。



< 発信 >



< 終話 >

COM-DEX使用中の音量調節

通信中に音量を調整する場合は、スマートフォンのボリュームボタンで調節します。



補聴器マイク オフ・オン ボタン

周囲が騒がしく聞きにくいときは、COM-DEXの補聴器マイクオフボタンを押します。

※補聴器マイクオフボタンを使用すると、周囲の音が聞こえなくなります。安全なところでお使いください。



電話着信や音楽再生により、COM-DEXからの通信が始まり、補聴器から周囲の音が聞こえなくなった場合、補聴器のマイクが一時的にオフになっている可能性があります。補聴器マイクオフボタンを押すと、補聴器のマイクがオンになります。

！ 他の方に電話を代わるときは？

他の方に電話を代わる場合、現在の設定ではスマートフォンの出力先がCOM-DEXになっているため、スマートフォンから聞こえません。

音声出力先やオーディオ設定をスマートフォンに変更します。

※設定が変えられない機種もあります。

