

リモートマイクとCOM-DEXアプリ 使用ガイド

COM-DEXアプリ（1.3以降）で リモートマイクの操作ができます。

※アプリ動作要件 : iPhone 4S、iOS 8.0以降 Android 4.4以降

リモートマイク使用時の COM-DEX アプリ画面

リモートマイクからの通信が始まると、
アプリ画面にリモートマイクの操作状態が表示されます。

リモートマイクの音量変更
タップして変更。
選択状態は「白」表示。

〈高：音量 大〉
〈中：電源投入時の音量〉
〈低：音量 小〉

リモートマイク音声の通信状態表示

リモートマイク ストリーミング
〈通信中〉
リモートマイクが接続されています
〈一時停止中〉

補聴器マイクのオフ/オン

〈オン〉 〈オフ〉

リモートマイク音声の一時停止 / 再開

〈停止する〉 〈再開する〉

リモートマイクからの通信中は、「音量」「プログラム」画面は、グレー表示になり操作できなくなります。
リモートマイクの通信を終えるか一時停止にすると、操作できるようになります。

リモートマイクからの通信が始まると表示されます。
リモートマイクの電源をオフにすると、グレー表示になります。

ウィジェットの追加（Androidのみ）

リモートマイクのウィジェットをホーム画面に追加すると、アプリを開かずに、リモートマイクの操作ができます。

リモートマイク用 ウィジェット

リモートマイクからの通信が始まると、操作できるようになります。

リモートマイクの通信が終わるとグレー表示になります。




COM-DEX用 ウィジェット

リモートマイクから通信が始まると、グレー表示になり操作できなくなります。

リモートマイクの通信を終えると、操作できるようになります。



補聴器マイクのオフ/オン

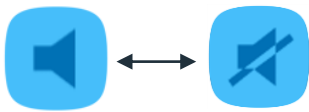

〈マイクオン〉 〈マイクオフ〉

リモートマイクの音量変更



〈音量大〉 〈音量小〉 〈音量中〉
(電源投入時)

リモートマイク音声の 通信一時停止 / 再開



〈停止する〉 〈再開する〉



- COM-DEXアプリが新しいバージョンへ更新された後で、動作に問題が生じた場合は、ご購入のお店までご相談ください。
- COM-DEX本体内のソフトウェアを更新する場合があります。