


充電式補聴器を快適にお使いいただくために 充電器かんたんマニュアル



充電器を使う前に

充電・保管場所についてのご注意


- ◎ 適温で充電・保管しましょう
- ✕ 湿気・直射日光を避けましょう

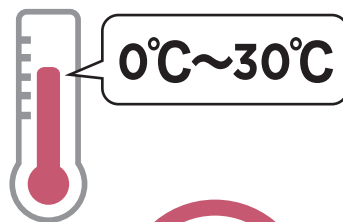

部品・配線についてのご注意


- ◎ ケーブル・アダプターは付属品を
- ✕ タコ足配線は避けてください

付属品

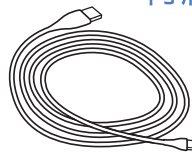


・ケーブル

・アダプター

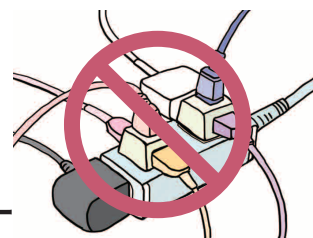


接続方法(スタンダード充電器・除菌乾燥充電器)

充電器に付属のUSBケーブル・ACアダプターをセットしてコンセントにつなぎます。
端子の向きに注意してください。

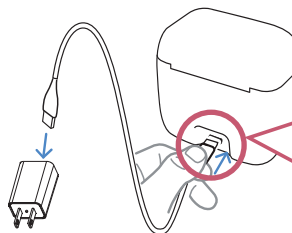

端子の向きに注意

幅が広い方が上です。

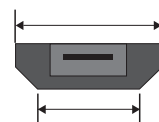

本体側



ケーブル側
(Micro USB)

お手入れの方法

- ◎ 充電スロット内は綿棒などでお掃除してください。
- ✕ お手入れに溶剤などの液体は使用しないでください。



高濃度アルコール
シンナー
ベンジン

補聴器を長期間使用しない時は


補聴器をフル充電して保管し、6ヶ月に最低1回はフル充電するようにしてください。



半年に1回は補聴器をフル充電


インジケーターで充電や除菌乾燥の状態が確認できます。

充電の状態(スタンダード充電器・除菌乾燥充電器)

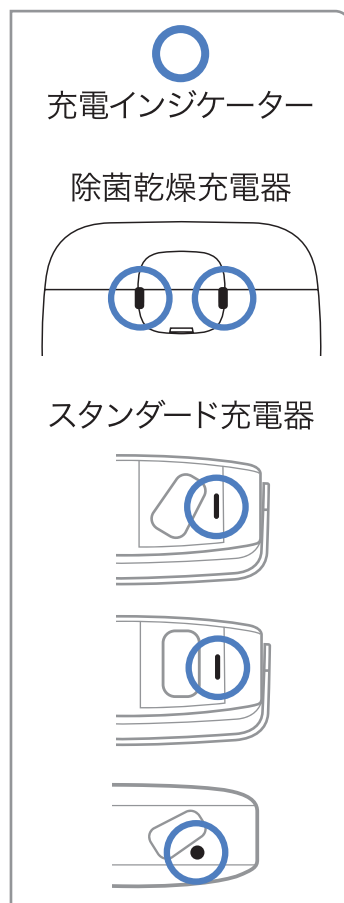

部分の光り方	充電器の状態	必要な対応
 オレンジ点灯	正常	充電中(緑点滅)になるまでお待ちください
 緑点滅 ↓ 緑点灯		充電中(緑点滅)⇒充電完了(緑点灯)までお待ちください (フル充電:約4時間)
 オレンジ点滅		上昇した機器の温度が適温になると充電を再開します
 赤点滅	充電エラー	アダプターをコンセントから外し、1分後につなぎなおしてください
上記の対応でも赤点滅が消えない場合や、赤点滅を繰り返す場合は、 お店に補聴器と充電器をお持ちください。		

除菌乾燥の状態(除菌乾燥充電器)

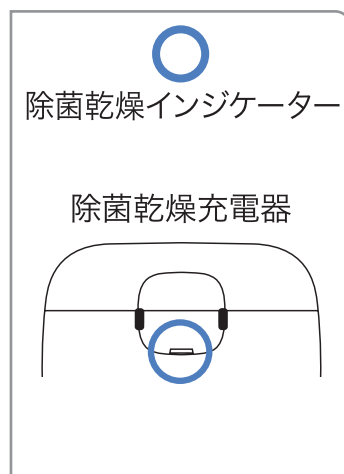

部分の光り方	充電器の状態	必要な対応
 白点滅 ↓ 白点灯	正常	除菌乾燥中(白点滅)⇒除菌乾燥完了(白点灯)になるまでお待ちください (除菌乾燥サイクル:約30分)
除菌乾燥完了後も上記の除菌乾燥サイクルを繰り返す場合があります		
 オレンジ点灯	正常	開いたカバーを閉じると除菌乾燥を再開します
 オレンジ点滅		上昇した機器の温度が適温になると除菌乾燥を再開します
 赤点滅	除菌乾燥エラー	アダプターをコンセントから外し、1分後につなぎなおしてください

上記の対応でも赤点滅が消えない場合や、赤点滅を繰り返す場合は、
お店に補聴器と充電器をお持ちください。

WIDEX

ワイデックス

補聴器ユーザー様専用フリーダイヤル

TEL ☎ 0120-332-604

FAX ☎ 0120-332-394



* 1 0 2 4 8 3 2 1 *