

充電式補聴器を快適にお使いいただくために ALLURE充電器かんたんマニュアル^[WPP101]


2026.01



⚠ 充電器を使う前に


充電・保管場所についてのご注意

- ◎ 適温で充電・保管しましょう
- ✗ 湿気・直射日光を避けましょう

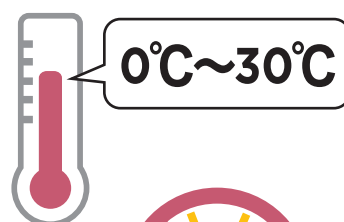


部品・配線についてのご注意

- ◎ ケーブル・アダプターは付属品を
- ✗ タコ足配線は避けてください

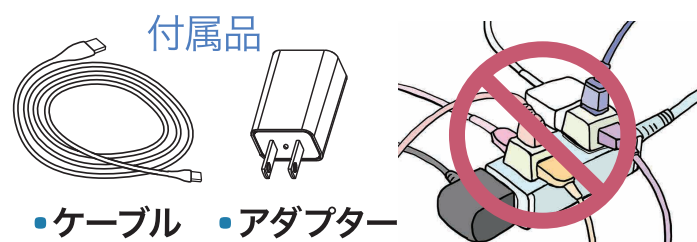

接続方法

充電器に付属のUSBケーブル・ACアダプターをセットしてコンセントにつないだら、補聴器をスロットに挿入します。音口部分がスロットの奥まで入っていることを確認します。

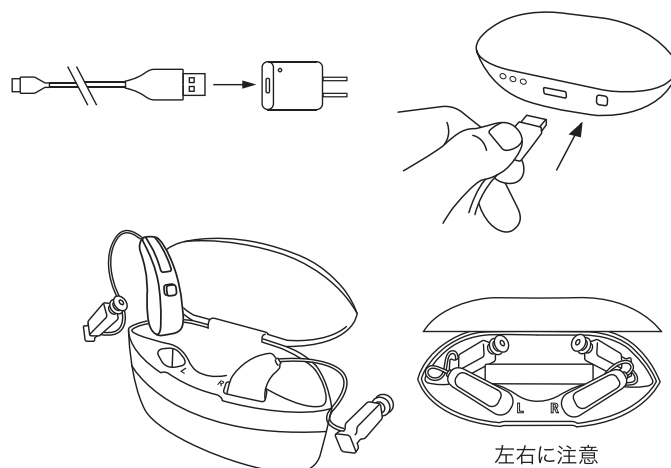

補聴器の向きを間違わないようにご注意ください。

お手入れの方法

- ◎ 電源を抜いてから、乾燥した柔らかい布で充電器を拭いてください。充電スロットのほこり・汚れが取れない場合は湿らせた布やウェットティッシュで丁寧に拭いてください。
- ✗ お手入れに溶剤などの液体は使用しないでください。

補聴器を長期間使用しない時は

補聴器をフル充電して保管し、6ヶ月に最低1回はフル充電するようにしてください。




半年に1回は補聴器をフル充電

インジケーターで充電の状態が確認できます。

充電の状態



充電インジケーター

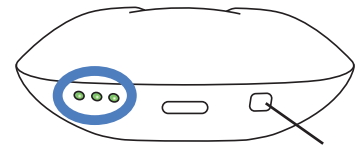

オン/オフ ボタン

充電器	充電器の状態	必要な対応
	正常	補聴器を3回以上充電可能
		補聴器を2回充電可能
		補聴器を1回充電可能
		補聴器を1回未満充電可能
		高温のため充電器の充電が一時停止中
		充電器の電池残量が少なく補聴器の充電不可
	充電エラー	充電器の充電エラー
		アダプターをコンセントから外し、1分後に繋ぎ直してください

充電器が電源に接続されていない場合は、充電器の蓋を開ける、補聴器を充電する、オン/オフボタンを押すのいずれかを行うと12秒間LEDが点灯または点滅します。

補聴器	補聴器の状態	必要な対応
	正常	充電完了
		充電中
		高温のため充電停止中
	充電エラー	過電圧または補聴器エラーのため充電停止中 補聴器を充電器から取り出し、15秒ほど待ってから、充電器に入れ直してください

上記の対応でも赤点滅が消えない場合や、赤点滅を繰り返す場合は、お店に補聴器と充電器をお持ちください。

