

充電式補聴器を快適にお使いいただくために ALLURE充電器かんたんマニュアル^[WPT501]

2026.01



充電器を使う前に

充電・保管場所についてのご注意



適温で充電・保管しましょう



湿気・直射日光を避けましょう



0℃～30℃



部品・配線についてのご注意



ケーブル・アダプターは付属品を




タコ足配線は避けてください

付属品





・ケーブル ・アダプター


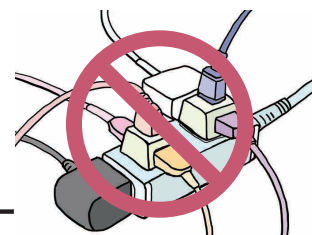


接続方法

充電器に付属のUSBケーブル・
ACアダプターをセットして
コンセントにつないだら、
補聴器をスロットに挿入します。
音口部分がスロットの奥まで
入っていることを確認します。

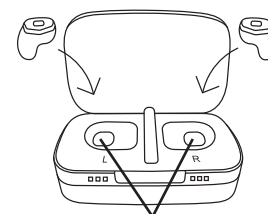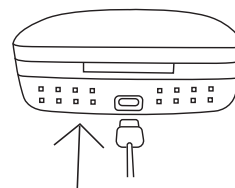

充電スロット

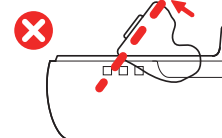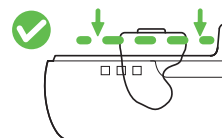

フェイスプレートができるだけ水平になるよう調整します。
補聴器の向きを間違わないようにご注意ください。

お手入れの方法



電源を抜いてから、乾燥した柔らかい布で充電器を拭いてください。
充電スロットのほこり・汚れが取れない場合は湿らせた布やウェット
ティッシュで丁寧に拭いてください。



お手入れに溶剤などの液体は使用しないでください。

補聴器を長期間使用しない時は

補聴器をフル充電して保管し、6ヶ月に最低
1回はフル充電するようにしてください。




半年に1回は補聴器をフル充電

インジケーターで充電の状態が確認できます。

充電の状態


充電インジケーター

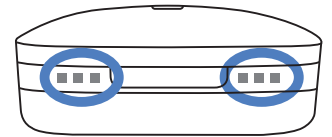

 部分の光り方	充電器の状態	必要な対応
 一度順番に緑点滅し、消灯	正常	充電器が電源に接続されています
 1つのインジケーターが緑色に点滅		補聴器は充電中です。電池の残量が低下しています。(33%未満)
 1つのインジケーターが緑色に点灯、1つが緑色に点滅		補聴器は充電中です。電池は33%以上充電されています。
 2つのインジケーターが緑色に点灯、1つが緑色に点滅		補聴器は充電中です。電池は67%以上充電されています。
 すべて緑点灯		充電完了
 順番にオレンジ点滅	充電エラー	一時充電停止中 上昇した機器の温度が適温になると充電を再開します
  順番に赤点滅		アダプターをコンセントから外し、1分後につなぎなおしてください

上記の対応でも赤点滅が消えない場合や、赤点滅を繰り返す場合は、お店に補聴器と充電器をお持ちください。

