


iPhoneをお使いの方へ




iPhoneとALLUREのペアリング

- 1 注意** はじめに補聴器の電源を**オフ**しておきます。
- 2** 「設定」に戻り、「アクセシビリティ」>「**ヒアリングデバイス**」の順にタップします。
- 3 重要** ここで補聴器の電源を入れます。

iPhoneのホーム画面で「設定」をタップし、「Bluetooth」よりBluetoothをオンにします。

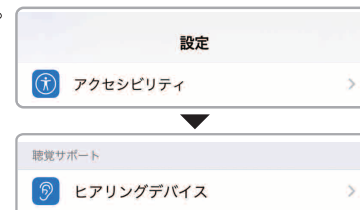

iPhoneが補聴器を検索します。検索された「補聴器の名前」をタップします。

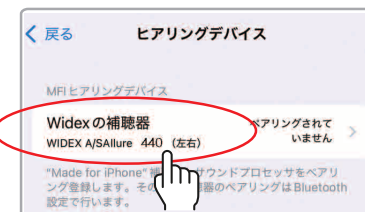


- 4 Bluetoothペアリングの要求** で「ペアリング」をタップします。両耳の場合は2回ペアリングを行います。ペアリングには1分程かかることがあります。



- 5** 下記のような画面になれば、iPhoneと補聴器のペアリングは完了です。ホーム画面に戻ります。両耳でペアリングに失敗する場合は、補聴器1台ずつのペアリングを試してください。



- 6** アプリのアイコンをタップしてALLUREアプリを起動します。iPhoneで補聴器を操作できるようになります。

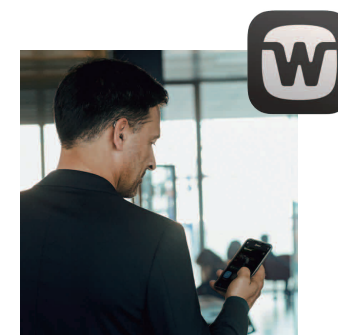

※画面はiOS17.5.1の画面です。お使いのiPhoneによっては表示が異なる場合があります。

ALLURE [アルーア]

アプリ設定ガイド

2025.08

まずはアプリをダウンロード


WIDEX ALLURE™



※iPhone XS以降 (iOS17.0以降)
※スマートフォンの機種により使用できない場合がありますので予めご確認ください。

ご使用の補聴器が何かわからない場合は取扱説明書をご確認ください。

👍 iPhoneなら、他にも便利な使い方ができます！

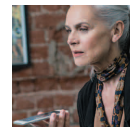


● **電話**
補聴器のマイクを使用したハンズフリー通話が可能です。iPhoneの画面を操作して通話してください。



● **音楽ストリーミング**
音楽を再生すると補聴器から直接音楽を聞くことができます。

❗ iPhoneと補聴器が接続できない場合は次の操作をお試しください。

- 一度充電器に収納した後、補聴器を取り出してしばらく待つ。またはプログラムボタンを長押しし、電源オフにした後再度プログラムボタンを長押ししてしばらく待つ。
- iPhoneのBluetoothを一度オフにし、10秒程度経過してから再びオンにする。
- iPhoneを再起動してから、再度補聴器との接続を試す。

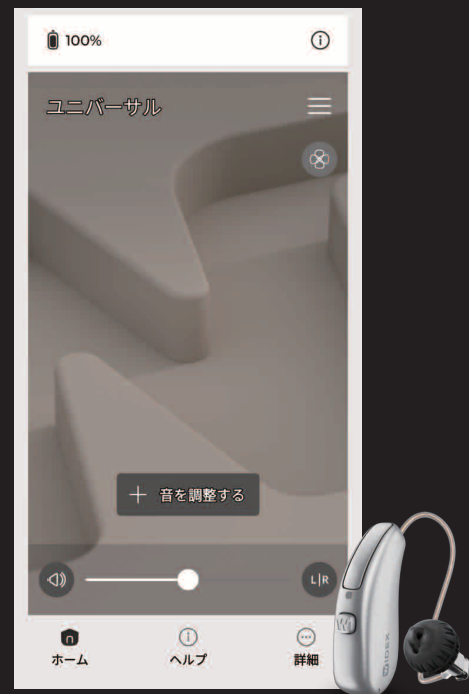

ALLURE [アルーア] アプリ設定ガイド

2025.08

まずはアプリをダウンロード

WIDEX ALLURE™



※Android 9.0以降、
Bluetooth4.2以降で対応。
※スマートフォンの機種により使用できない
場合がありますので予めご確認ください。


ご使用の補聴器が何かわからない場合は取扱説明書をご確認ください。

スマートフォンとALLUREのペアリング


- 1 注意**
設定 > 接続設定 > 接続の詳細
設定からBluetoothを開き、
Bluetoothをオンにします。




- 2**
アプリを起動し、**その他のオプション**
を表示をタップし、**補聴器をペア**
リングするをタップします。

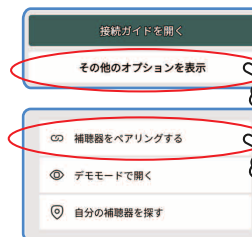


- 3**
新規ペアリングの**開始**をタッ
プし、補聴器の電源を入れて
から**続ける**をタップします。

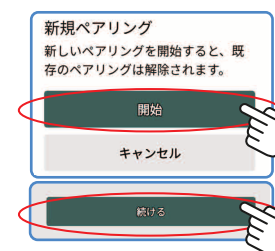


- 4**
検索をタップし、検索され
た補聴器をタップします。

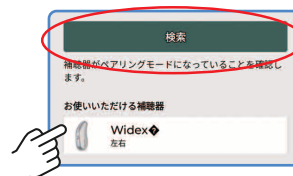


- 5**
ペア設定するをタップします。
両耳でうまくペアリングできない場
合は1台ずつペアリングを行ってくだ
さい。

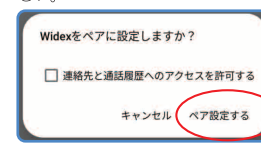

ASHA対応端末をご使用の場合、もう一度**補聴器をペアリングしてください**と表示されることがあります。アプリを閉じ、設定画面から補聴器とのペアリングを解除し、再度**1**～**5**の手順でペアリングを行ってください。

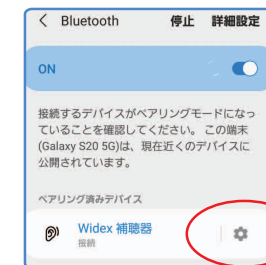

- 6**
補聴器のペアリング(両耳の場合
は2台)が終わったら**終了**をタッ
プします。

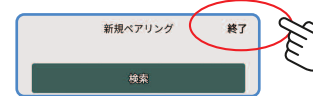


※画面はAndroid 14のもので。お使いのスマートフォンによっては表示が異なる場合があります。

ASHA対応モデルなら他にも
便利な使い方ができます！



ASHA対応端末についてはホームページをご確認ください。<https://www.widex.com/ja-jp/support/compatibility/>

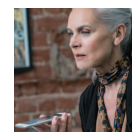

● 電話
スマートフォンの画面を操作して
通話してください。



● 音楽ストリーミング
音楽を再生すると補聴器から直
接音楽を聞くことができます。

スマートフォンと補聴器が
接続できない場合は次の
操作をお試しください。

- 一度充電器に収納した後、補聴器を取り出してしばらく待つ。またはプログラムボタンを長押しし、電源オフにした後再度プログラムボタンを長押ししてしばらく待つ。
- スマートフォンのBluetoothを一度オフにし、10秒程度経過してから再びオンにする。
- スマートフォンを再起動してから、再度補聴器との接続を試す。