

Androidをお使いの方へ

Androidの場合



EVOKEアプリ 設定ガイド

2022.04



WIDEX EVOKE™
HEARING HAS EVOLVED

EVOKEをはじめよう！ まずはアプリをダウンロード




※Android 9.0以降、Bluetooth4.2以降で対応。
※スマートフォンの機種により使用できない場合がありますので予めご確認ください。

EVOKEアプリは、F2/BTE13Dモデル用です。

スマートフォンとEVOKEのペアリング

1 注意 最初、補聴器の電源は**オフ**にしておきます。

スマートフォンの「設定」> Bluetoothをオンにします。

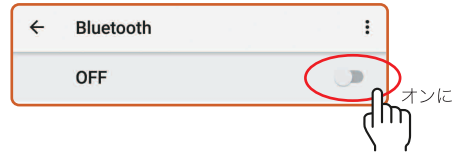


2 重要 次に補聴器の電源を入れます。
スマートフォンが補聴器を検索します。両耳装用の場合は1台ずつ検索されますので、まず1台目の「補聴器の名前」をタップし、ペアリングを行います。




3 タップすると自動でペアリングが始まります。ペアリングには1分程かかることがあります。



4 両耳装用の場合はもう1台の「補聴器の名前」をタップし、ペアリングを行います。

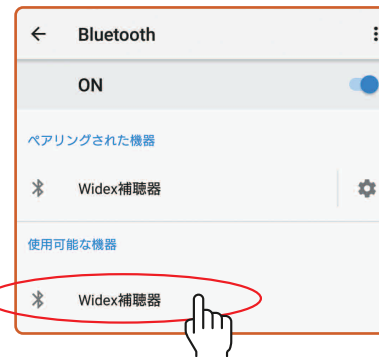

5 下記のような画面になれば、スマートフォンと補聴器のペアリングは完了です。ホームボタンを押しホーム画面に戻ります。

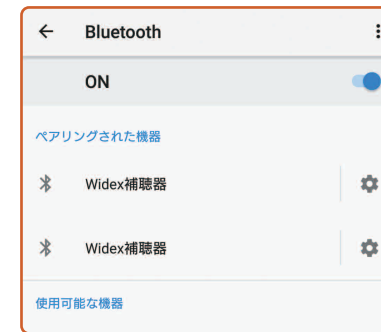

6 EVOKEアプリをタップして起動します。スマートフォンでEVOKEをリモコン操作できるようになります。



スマートフォンと補聴器が接続できない場合

- 補聴器のバッテリードアを開け、5秒以上経過してから電源を入れ、しばらく待ってみる。
- スマートフォンのBluetoothを一度オフにし、10秒程度経過してから再びオンにしてみる。
- スマートフォンを再起動してから、再度試してみる。