


故障かなと思ったら

耳あな型補聴器の場合

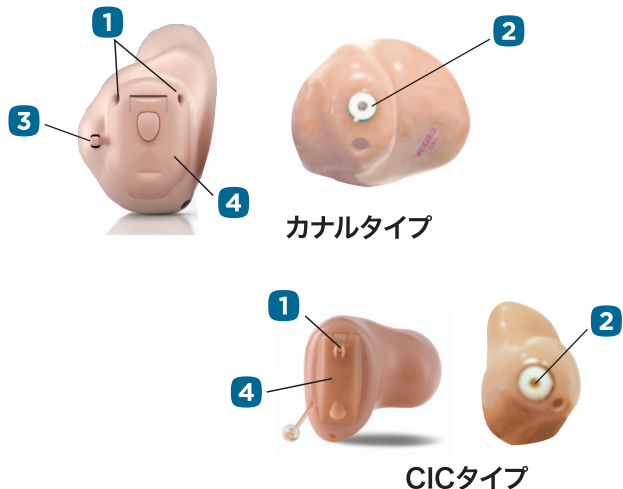

音が出ない

- 電池は入っていますか？
- バッテリーホルダー/カバー④は、しっかり閉まっていますか？
- 電池のシールは、はがされていますか？
- 電池の+と-が逆さまではありませんか？
- 音の出口②に耳あかがつまっていませんか？

音が小さい

- 新しい電池と交換してみてください
- (ボリュームコントロール③付の場合)ボリュームが下がっていませんか？
- 音の出口②に耳あかがつまっていませんか？
- 音の入口①にごみやホコリが入っていませんか？

変な音がる

- 新しい電池と交換してみてください
- 音の出口②に耳あかがつまっていませんか？
- 音の入口①にごみやホコリが入っていませんか？

ピーピー音がる

- 補聴器がしっかり耳に入っていますか？

耳かけ型・ミニ耳かけ型 RIC/RITE補聴器の場合



音が出ない

- 電池は入っていますか？
- バッテリーホルダー④は、しっかり閉まっていますか？
- 電池のシールは、はがされていますか？
- 電池の+と-が逆さまではありませんか？
- 音の出口②に耳あかがつまっていませんか？
- チューブ⑤やイヤモールド⑥に水滴や耳あかが溜まっていますか？

音が小さい

- 新しい電池と交換してみてください
- (ボリュームコントロール③付の場合)ボリュームが下がっていませんか？
- 音の出口②に耳あかがつまっていませんか？
- 音の入口①にごみやホコリが入っていませんか？
- チューブ⑤やイヤモールド⑥に水滴や耳あかが溜まっていますか？

変な音がる

- 新しい電池と交換してみてください
- 音の出口②に耳あかがつまっていませんか？
- 音の入口①にごみやホコリが入っていませんか？
- チューブ⑤やイヤモールド⑥に水滴や耳あかが溜まっていますか？

ピーピー音がる

- 耳せんやイヤモールド⑥がしっかり耳に入っていますか？