


COM-DEX tilslutningsguide

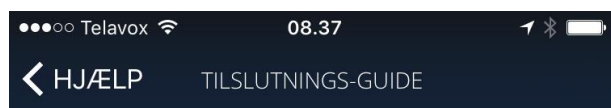

1. HALSSLYNGE



Tænd for COM-DEX ved at lukke halsslyngen

2. SÅDAN PARRER DINE ENHEDER

Du kan parre COM-DEX med din enhed fra Indstillinger under Bluetooth-menuen.

3. KLAR TIL BRUG




Åben COM-DEX app'en, og den er klar til brug

4. FEJLFINDING

Nedenfor er der angivet forskellige måder til løsning af generiske problemer med COM-DEX tilslutningen

Når COM-DEX ikke er blevet brugt i et stykke tid, skifter den til strømsparetilstand.


Tryk på knappen PUSH på COM-DEX for at deaktivere strømsparetilstanden.

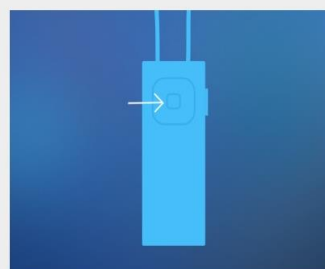

I nogle tilfælde forbindes COM-DEX ikke korrekt med telefonen. I så fald kan det være en hjælp at gå til Bluetooth menuen og trykke på knappen "glem enhed" og foretage en ny parring.

Hvis du stadig ikke kan skabe forbindelse til COM-DEX, så forsøg følgende:

1. Sæt COM-DEX i opladeren
2. Hold begge knapper nede

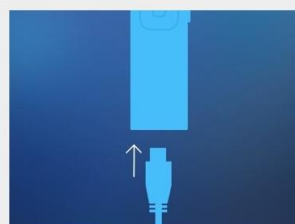

1



2

3. Giv slip på knapperne, når COM-DEX lyser blåt (efter ca. 5 sekunder)

4. Tag stikket fra COM-DEX ud af opladeren



4