

PIKAOHJE

WIDEX SOUNDCONNECT

Tämä tietopaketti tarjoaa sinulle tärkeimmät tiedot Widex SoundConnectista nopeasti.

Mikä on Widex SoundConnect

Widex SoundConnect voi suoratoistaa ääntä kaikista ohjelmista missä äänilähtö, esimerkiksi: Microsoft Teams, Zoom, Skype, Google Meet ja muut musiikki ja mediasoittimet

Minkäläisten ohjelmistosovellusten kanssa Widex SoundConnectia voidaan käyttää?

Widex SoundConnect on huomaamaton ja tyylikäs USB-dongle, jota voidaan käyttää äänen suoratoistamiseen henkilökohtaisesta tietokoneesta käyttäjän yhteensopiviin Widex-kuulokojeisiin

Tekniset tiedot

Liittimen tyyppi	USB-A ”standardi” -liitin
Kuulokoje yhteensopivuus	Widex Moment, Widex Magnify Bluetooth-yhteensopivat kuulokojeet
Sovellusyhteensopivuus	Widex MOMENT, Widex MAGNIFY-Sovellus
PC-asetus	Plug-and-play*
Kantama	8 metriä ilman esteitä, 5 metriä ulkotiloissa

*Harvinaisissa tapauksissa, joissa tietokoneeseen on kytketty useita äänen ulostulolaitteita, saattaa olla tarpeen valita Widex SoundConnect aktiivisesti äänen ulostulolaitteeksi.

Kuinka liitetään Widex SoundConnect kuulokojeisiin

1. Liitä Widex SoundConnect PC:n tai kannettavan tietokoneen USB-porttiin.
2. Uudelleenkäynnistä kuulokojeet asettaaksesi ne parinmuodostustilaan kolmeksi minuutiksi
3. Paina ja pidä pohjassa donglen painiketta, kunnes merkkivalo alkaa vilkkua sinisenä.

Varmista, että kuulokojeet ja Widex SoundConnect ovat alle 1,5 metrin etäisyydellä toisistaan.
4. Valoindikaattori syttyy tasaisen vihreäksi (himmeä), kun parinmuodostus on valmis.

LED-valoindikaattori

LED-valoindikaattorin eri värien merkitykset ovat:


Vilkkuva valkoinen	Ei ole pariliitettynä kuulokojeisiin
Vilkkuva sininen	Parinmuodostustila
Vilkkuva vihreä	Etsitään aikaisemmin pariliitettyjä kuulokojeita
Pysyvä vihreä (himmeä)	Yhdistetty kuulokojeisiin, mutta äänisignaalia ei ole
Pysyvä vihreä (kirkas)	Suoratoistaa ääntä kuulokojeisiin
Pysyvä oranssi	Huoltotila
Vilkkuva punainen	Vikatila



SOUNDCONNET MOMENT SOVELLUKSESSA


Jaettu ”Profiili”
SoundConnect ja SoundAssistant käyttää samaa profiilia kuulokojeista

Äänenvoimakkuus/ vaimennus
Säädä yhdistettyä äänen voimakkuutta tai vaimenna kuulokojeiden mikrofonit

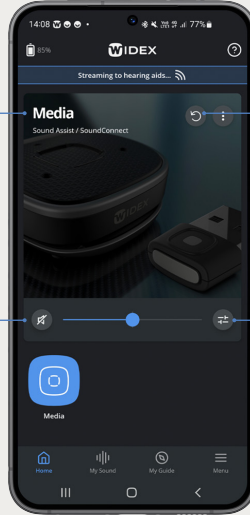

Palautus
Palauta äänen säädöt oletusarvoihin


Asetukset
Säädä striimattavan äänen asetuksia

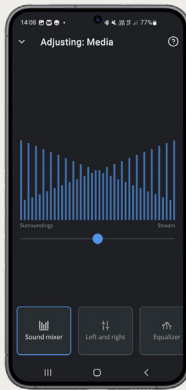


Äänen tasapaino
Säädä tasapainoa striimattavan äänen ja ympäristön äänen suhteen




Eriytetty äänenvoimakkuuden säädin
Säädä striimattavan äänen voimakkuutta korvakohtaisesti

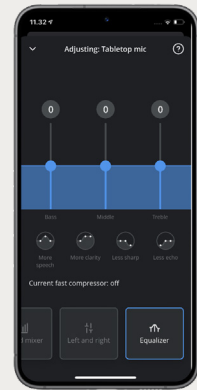


Taajuuskorjain
Säädä matalien, keskitaajuuksien ja korkeiden äänien tasapainoa striimattavassa äänessä

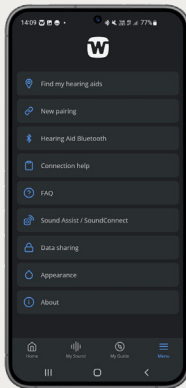

Tuki
Lisätietoja saatavana ”SoundAssist/SoundConnect” välilehdeltä

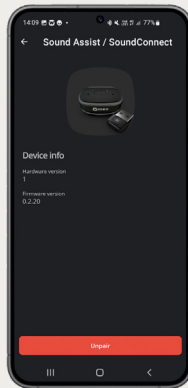

Laite tiedot
Näyttää laiteversion ja ohjelmistoversion

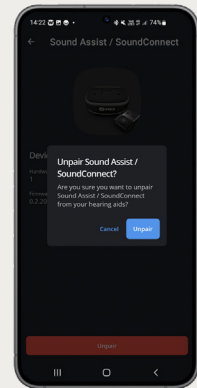

Pariliitoksen purkaminen
SoundConnectin ja kuulokojeiden väliltä (kun ei striimata)