

WIDEX mRIC CHARGE n CLEAN



TÄRKEIMMÄT OMINAISUUDET

- Pienikokoinen ja kannettava: irrota USB, sulje kansi ja laita tasakuun tai laukkuun.
- Voi käyttää useita eri virtalähteitä.
- Intuiitivista käyttöä tukevat merkkivalot, jotka osoittavat kuulokojeen lataustason.
- Älykäs suojattu malli, jossa saranoitu helppokäyttöinen kansi.

KUVAAUS

WIDEX mRIC CHARGE n CLEAN -laturi on tarkoitettu lataamaan ja huoltamaan kahta WIDEX MRR2D -kuulokojetta.

Laturissa on latauskaukalo kummallekin kuulokojeelle, puhdistuskotelo (kuivaus ja UV-C) kuulokkeille, kaksi merkkivaloa (sivuilla) jotka ilmoittavat yksittäisten kuulokojeiden latauksen tilan sekä merkkivalo keskellä, joka ilmoittaa puhdistuksen tilan. Kumpaakin kuulokojetta voidaan ladata yksittäin kuulokojeen latauksen tilasta riippuen. Tämä tarkoittaa sitä, että jos yksi kuulokoje on ladattu täyteen ja asetettu laturiin, se ei lataudu. Jos toinen kuulokoje ei kuitenkaan ole ladattu, se latautuu. Kuulokojeiden latauksen aikana suoritetaan puhdistus (UV-C ja kuivaus). Puhdistus kestää 30 minuuttia.

OMINAISUUDET

Väri:	Musta
Mitat:	Korkeus: 50 mm Leveys: 83 mm Syvyys: 40 mm
Paino:	n. 100 g
Kapasiteetti:	Laturiin mahtuu kuulokoje pari. Voi ladata kuulokojeita yksittäin. Katso latausaika ja ilmoitukset WIDEX mRIC CHARGE n CLEAN -laturin Käyttöohjeesta.
UV-valo:	UV-puhdistus ja kuivaus tapahtuu latauksen aikana. Puhdistus kestää 30 minuuttia.
Käyttölämpötilan, ilmankosteuden ja ilmanpaineen vaihteluväli:	0 °C (32 °F) - 35 °C (95 °F), 20 % - 75 % rH
Säilytys ja kuljetus:	-20 °C (4 °F) - 60 °C (140 °F), 5 % - 90 % rH

VIRTALÄHDE

Tulo	Tyyppi: Tasavirta, stabiloitu 5 V +/- 5 % Liitin: mikro-USB -portti Minimivirta: 900 mA Mahdollista käyttää eri virtalähteitä (vähimmäisyhteensopivuus USB 2.0). Virtapankki: Kapasiteetti: 10 000 mA/h - Liitin: USB - Teho: 5 V Kuulokoje saattaa lämmentä latauksen aikana.
------	---

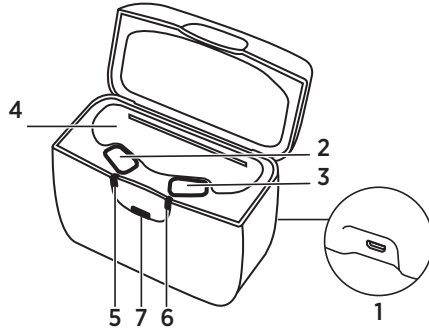
HÄVITTÄMINEN

- Älä hävitä laitetta (uutta tai käytettyä) tavallisen kotitalousjätteen mukana.
- Laitte on hävitettävä elektronisena tai kemiallisena jätteenä paikallisten määräysten mukaisesti.

Laturi yhdellä silmäyksellä

Laitte koostuu kummankin kuulokojeen latausyksiköstä, kuulokkeiden puhdistuskotelosta ja kolmesta merkkivalosta, jotka ilmaisevat kuulokojeiden latauksen sekä puhdistuskierron tilan. Kansi pysyy kiinni magneetin avulla.

1. Micro USB-portti
2. Vasemman kuulokojeen latauslokero
3. Oikean kuulokojeen latauslokero
4. Kuulokkeiden puhdistuslokero
5. Vasemman kuulokojeen latauksen merkkivalo
6. Oikean kuulokojeen latauksen merkkivalo
7. Puhdistuksen merkkivalo

**PAKKAUS SISÄLTÄÄ**

Myyntipakkaus sisältää:

- Yhden laturin
- Yhden USB-johdon
- Yhden virtalähteen
- Yhden käyttöohjeen