

WIDEX **MOMENT™**

ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ

СІМЕЙСТВО СЛУХОВИХ АПАРАТІВ WIDEX

MOMENT™

Модель M-CIC-M/M-CIC-M TR
CIC
(внутрішньоканальний слуховий апарат)



WIDEX®
HIGH DEFINITION HEARING

ВАШ СЛУХОВИЙ АПАРАТ

(Заповнюється фахівцем із налаштування слухових апаратів)

Вентиляцій- Короткий Довгий Немає
ний отвір:

Це список можливих програм для вашого слухового апарата. Детальну інформацію про використання цих програм див. в підрозділі «Програми» розділу «Персональні налаштування».

Програми слухового апарата:

ПРОГРАМИ	РОЗШИРЕННЯ ЗВУКОВОГО ДІАПАЗОНУ
<input type="checkbox"/> Універсальна	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Тиша	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Комфорт	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Транспорт	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Місто	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Зовнішній вплив	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Вечірка	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Спілкування в компанії	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Музика	<input type="checkbox"/>

СПЕЦІАЛЬНІ ПРОГРАМИ**РОЗШИРЕННЯ ЗВУКОВОГО
ДІАПАЗОНУ** Дзен Телефон**ПРОГРАМА SMARTTOGGLE****РОЗШИРЕННЯ ЗВУКОВОГО
ДІАПАЗОНУ** Дзен+

Наведені в таблиці назви програм є стандартними. Якщо потрібно скористатись іншими доступними назвами, запишіть їх у таблицю. Так ви завжди знатимете, які програми є у вашому слуховому апараті.

ПРИМІТКА

Уважно ознайомтеся з цією інструкцією перед початком використання слухового апарата.

ПРИМІТКА

Цей слуховий апарат зв'язується з додатком TONELINK за допомогою бездротової мережі. Ми не несемо відповідальності, якщо слуховий апарат використовується з додатками сторонніх розробників або якщо додаток TONELINK використовується з будь-якими невідтримуваними пристроями.

ЗМІСТ

ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО БЕЗПЕКИ.....	6
ВАШ СЛУХОВИЙ АПАРАТ.....	8
Вітаємо!.....	8
Загальний огляд вашого слухового апарата.....	8
УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ.....	10
Показання до застосування.....	10
Призначення.....	10
Умови експлуатації.....	11
Умови зберігання та транспортування.....	11
ЩОДЕННЕ ВИКОРИСТАННЯ.....	12
Увімкнення та вимкнення слухового апарата.....	12
Надівання та знімання слухового апарата.....	13
БАТАРЕЙКА.....	14
Попередження про низький рівень заряду батарейки.....	14
Заміна батарейки.....	15
ПЕРСОНАЛЬНІ НАЛАШТУВАННЯ.....	16
Програми.....	16
Режим «Дзен».....	18
Зміна програми.....	18
Звукові сигнали.....	18

ОЧИЩЕННЯ.....	19
Інструменти.....	19
Як очистити слуховий апарат.....	19
Фільтр для сірки.....	22
ПОШУК І УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ.....	25
НОРМАТИВНО-ПРОВОА ІНФОРМАЦІЯ.....	28
Заяви щодо відповідності вимогам Федеральної комісії зі зв'язку США (FCC) і Міністерства інновацій, науки та економічного розвитку Канади (ISED)....	28
Інформація щодо утилізації.....	30
СИМВОЛИ.....	31

ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО БЕЗПЕКИ

Уважно ознайомтеся з цією інструкцією, перш ніж використовувати слуховий апарат.



Слухові апарати та батарейки можуть бути небезпечними, якщо ними неправильно користуватися або проковтнути їх. Неправильне використання або ковтання апарата чи батарейки може призвести до серйозних травм або навіть смерті. У разі ковтання негайно зверніться до місцевої служби швидкої допомоги або лікарні.



Якщо ви не користуєтеся слуховим апаратом, виймайте його з вуха. Це сприятиме потраплянню повітря до вушного каналу та запобігатиме зараженню вуха інфекціями.



Якщо ви маєте підозру на вушну інфекцію або алергічну реакцію, негайно зверніться до свого лікаря або фахівця з налаштування слухових апаратів.



Якщо вам незручно зі слуховим апаратом або його вставлено неправильно й він викликає подразнення, почервоніння тощо, зверніться до свого фахівця з налаштування слухових апаратів.



Виймайте слуховий апарат щоразу перед прийманням душу, плаванням чи використанням фена для волосся.



Виймайте слуховий апарат, перш ніж застосовувати парфуми, спреї, гелі, лосьйони чи креми.



Не сушіть слуховий апарат у мікрохвильовій печі: це призведе до його поломки.



У жодному разі не користуйтеся слуховими апаратами інших користувачів і не давайте нікому користуватися вашим, адже в обох випадках це може призвести до погіршення слуху.



У жодному разі не використовуйте слуховий апарат у середовищі, де можлива наявність вибухонебезпечних газів, наприклад у шахтах тощо.



Тримайте слуховий апарат, його частини, аксесуари та батарейки в місці, що недоступне для дітей і психічно хворих людей.



Ніколи не намагайтеся самостійно відкрити або відремонтувати слуховий апарат. Якщо слуховий апарат потребує ремонту, зверніться до фахівця з налаштування слухових апаратів.



У цьому слуховому апараті застосовується технологія радіозв'язку. Щоразу під час використання слухового апарата слід звертати увагу на середовище, у якому ви перебуваєте. Якщо в тому чи іншому середовищі застосовуються певні обмеження, дотримуйтеся відповідних заходів безпеки.



Ваш пристрій розроблено відповідно до міжнародних стандартів електромагнітної сумісності. Але все-таки існує ймовірність, що він може створювати перешкоди для іншого електричного обладнання. Якщо виникли перешкоди, тримайтеся на відстані від іншого електричного обладнання.



Не піддавайте слуховий апарат впливу екстремальних температур або високої вологості. Якщо апарат намокнув або ви відчуваєте, що сильно спітніли, ретельно висушіть його.

ВАШ СЛУХОВИЙ АПАРАТ


Вітаємо!

Вітаємо з придбанням нового слухового апарата.

Користуйтеся вашим слуховим апаратом постійно, навіть якщо вам потрібен деякий час, щоб звикнути до нього. Користувачі, які не застосовують апарат регулярно, зазвичай не можуть скористатися всіма його перевагами.

Вигляд вашого слухового апарата та аксесуарів може відрізнятися від зображень у цій інструкції. Крім того, ми залишаємо за собою право вносити до інструкції будь-які необхідні зміни.

Загальний огляд вашого слухового апарата

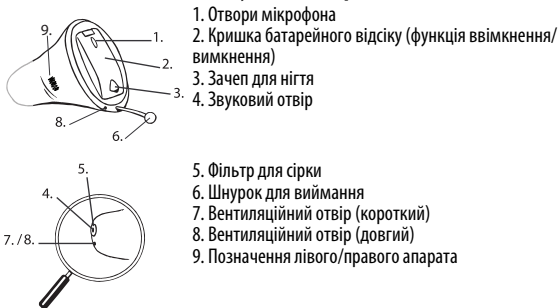

Колір позначення лівого/правого апарата допомагає визначити апарат для лівого й правого вуха. На апараті для лівого вуха розташована мітка синього кольору. На апараті для правого вуха розташована мітка червоного кольору.

УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ

Показання до застосування

Цей слуховий апарат рекомендовано використовувати дорослим особам і дітям старше ніж 36 місяців із діапазоном рівня втрати слуху від мінімального (10 дБ HL) до тяжкого (90 дБ HL) з будь-якими варіаціями втрати слуху.

Прилад повинен запрограмувати фахівець із проблем слуху (сурдолог, фахівець із налаштування слухових апаратів, отоларинголог), який має відповідну ліцензію та пройшов навчання з реабілітації слуху.

Призначення

Слуховий апарат призначено для посилення звуку в повсякденному звуковому оточенні. Він може мати режим «Дзен», який створює звуковий фон для розслаблення (тобто музику/шум), призначений для дорослих, які хочуть слухати такий фон у тиші.

Умови експлуатації

Слухові апарати розроблено для повсякденної експлуатації, і вони працюють у комфортних для користувачів умовах. Ви можете носити слухові апарати під час авіаперельотів, але знімайте їх перед прийманням душу чи плаванням.

Нижче наведено конкретні умови експлуатації слухових апаратів.

	Мінімум	Максимум
Температура	0 °C (32 °F)	50 °C (122 °F)
Вологість	10 % відносної вологості	95 % відносної вологості
Атмосферний тиск	750 мілібарів	1060 мілібарів

Умови зберігання та транспортування

Ваш слуховий апарат чутливий до екстремальних умов довкілля, зокрема високої температури. Його не слід зберігати та транспортувати під прямими сонячними променями, і необхідно дотримуватися описаних нижче умов.

Особливі умови зберігання та транспортування

	Мінімум	Максимум
Температура	-20 °C (-4 °F)	55 °C (131 °F)
Вологість	10 % відносної вологості	95 % відносної вологості

Технічні характеристики слухового апарата та додаткову інформацію можна знайти за <https://global.widex.com>.

ЩОДЕННЕ ВИКОРИСТАННЯ

Увімкнення та вимкнення слухового апарата



Щоб увімкнути слуховий апарат, закрийте кришку батарейного відсіку. Слуховий апарат відтворить звуковий сигнал, що свідчить про увімкнення пристрою (якщо фахівець із проблем слуху не вимкнув цю функцію).



Для вимкнення слухового апарата відкрийте батарейний відсік.

ПРИМІТКА

Крім того, для перевірки увімкненого стану слухового апарата можна покласти його на руку. Якщо апарат увімкнений, він почне свистіти. Не забувайте вимикати слуховий апарат, якщо ви ним не користуєтесь.

Надівання та знімання слухового апарата



Щільно закрийте кришку відсіку. Тримайте слуховий апарат великим і вказівним пальцями та повільно введіть його у вухо, доки не відчуєте опір.

Кінчиком вказівного пальця обережно вдавить слуховий апарат у вухо так, щоб вам було комфортно з ним. Щоб полегшити надягання апарата, спробуйте потягувати зовнішнє вухо вперед-назад.



Якщо потрібно дістати слуховий апарат із вуха, потягніть за шнурок для виймання.

ПРИМІТКА

Якщо вам важко дістати слуховий апарат, обережно рухайте його в один і в інший бік, коли тягнете за шнурок для виймання.

БАТАРЕЙКА

Для живлення слухового апарата **слід використовувати батарейку типу 10** (повітряно-цинкову).

При заміні батарейок слід завжди використовувати нову батарейку, що не використовувалася до цього та точно відповідає типу батарейок, який порекомендував ваш фахівець із питань слуху.

ПРИМІТКА

Перед вставленням батарейки до слухового апарата слід переконатися, що вона чиста й на ній немає залишків інших речовин. В іншому разі ваш слуховий апарат може не працювати належним чином.



У жодному разі не намагайтеся перезаряджати батарейки до слухового апарата, оскільки вони можуть вибухнути.



У жодному разі не лишайте розряджену батарейку в слуховому апараті, який слід покласти на зберігання. У цьому разі може трапитися витік речовини та пошкодження слухового апарата.



Викидайте використані батарейки відповідно до інструкцій, наведених на упаковці, зважаючи на термін придатності батарейки.

Попередження про низький рівень заряду батарейки

Коли батарейка розрядиться, пристрій подасть звуковий сигнал. У деяких випадках батарейка може розрядитися так раптово, що ви можете взагалі не отримати попередження. Де б ви не були, завжди рекомендується мати під рукою запасну батарейку.

Заміна батарейки

Щоб замінити батарейку, виконайте такі дії.



Зніміть захисну наклейку з нової батарейки та переконайтеся, що на батарейці немає залишків клейкої речовини. Залиште батарейку «провітритися» на 60 секунд.

Зацепіть виступ нігтем і обережно відкрийте кришку батарейного відсіку, щоб дістати стару батарейку.

Після цього помістіть нову батарейку у відсік, як показано на рисунку. Закрийте кришку. Якщо ви не можете закрити відсік без зусиль, це означає, що батарейку встановлено неправильно. Якщо ви не плануєте користуватися слуховим апаратом протягом кількох днів, дістаньте батарейку.

ПРИМІТКА

Уникайте падіння слухового апарата. При заміні батарейки слід тримати слуховий апарат над м'якою поверхнею.

ПЕРСОНАЛЬНІ НАЛАШТУВАННЯ

Програми

Це огляд програм, з яких ви можете вибирати. Фахівець із налаштування слухових апаратів зможе дати вам пораду.

РЕЖИМИ	ВИКОРИСТАННЯ
Універсальний	Для щоденного використання
Тиша	Спеціальний режим для тихого середовища
Комфорт	Спеціальний режим для прослуховування в шумному середовищі
Транспорт	Для прослуховування в середовищі із шумами від автомобілів, потягів тощо
Вплив	Використовуйте цей режим, щоб отримати чіткий і чистий звук
Місто	Для прослуховування в середовищі з динамічним рівнем гучності звуку (у супермаркетах, на шумному робочому місці тощо)
Вечірка	Для прослуховування в середовищах, де кілька людей можуть розмовляти одночасно

РЕЖИМИ**ВИКОРИСТАННЯ**

Спілкування в компанії

Використовуйте цей режим під час перебування в невеликих компаніях людей, наприклад на сімейній вечері

Музика

Для прослуховування музики

СПЕЦІАЛЬНІ РЕЖИМИ**ВИКОРИСТАННЯ**

Дзен

Відтворення звукових сигналів чи шуму для звукового фону, що заспокоює

Телефон

Цей режим призначений для розмови по телефону

РЕЖИМИ SMARTTOGGLE**ВИКОРИСТАННЯ**

Дзен+

Цей режим аналогічний до «Дзен», проте, на відміну від нього, дає змогу прослуховувати різні типи тонів або шумів

ПРИМІТКА

Наведені в списку назви режимів є стандартними. Ваш фахівець із проблем слуху також може вибрати альтернативну назву режиму із заздалегідь налаштованого списку. Це допоможе вам ще простіше вибирати в кожній ситуації належний режим.

Залежно від рівня втрати слуху фахівець із проблем слуху може активувати функцію «Розширення звукового діапазону». Запитайте у свого фахівця з проблем слуху, чи підходить вам така функція.

Якщо через певний час ваші потреби та вподобання зміняться, ваш лікар зможе просто вибрати інший режим.

Режим «Дзен»

Ваш слуховий апарат може мати унікальний режим прослуховування «Дзен». У цьому режимі апарат відтворює фонові музичні тони (та іноді білий шум).



Якщо ви помічаєте значне зниження гучності, зміну звуків, нечіткість мови або погіршення шуму у вухах, зверніться до фахівця з налаштування слухових апаратів.



Використання режиму «Дзен» може заважати чути звичайні звуки, як-от мовлення. Не слід використовувати, коли важливо чути такі звуки. У таких випадках переведіть слуховий апарат у режим, відмінний від «Дзен».

Зміна програми

Змінювати програми й налаштування звуку в слухових апаратах можна також за допомогою додатка ToneLink.

Звукові сигнали


Ваш слуховий апарат відтворює звукові сигнали, що інформують про активацію певних функцій або зміну режиму. Ці звуки можуть бути голосовими повідомленнями або сигналами.

Попросіть фахівця з питань слуху вимкнути ці звуки, якщо вони вам не потрібні.

ОЧИЩЕННЯ

Інструменти

До комплекту слухового апарата входять зазначені нижче інструменти для очищення.

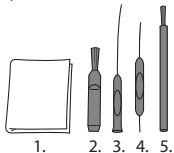

1. Тканина
2. Щітка
3. Довгий інструмент для видалення сірки
4. Короткий інструмент для видалення сірки
5. Магніт для батарейки

Як очистити слуховий апарат

Щоденне очищення слухового апарата сприятиме підвищенню його ефективності та зручності під час носіння.

Слуховий апарат



Протріть слуховий апарат м'якою тканиною (наприклад, тканиною, яку вам дав фахівець із проблем слуху).

Звуковий отвір



Видаліть усю помітну вушну сірку **навколо** звукового отвору невеликою щіткою або тканиною.


У жодному разі не намагайтеся чистити фільтр для сірки.

ПРИМІТКА

Якщо ви не можете очистити звуковий отвір, зверніться до фахівця з проблем слуху.

Ніколи не вставляйте нічого у звуковий отвір, оскільки це може пошкодити слуховий апарат.

Отвори мікрофона

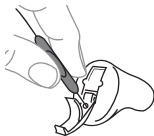


Відкрийте кришку батарейного відсіку так, щоб саму кришку було направлено донизу (як показано на рисунку). Вставте короткий інструмент для видалення сірки (№ 4) через отвори мікрофона, розташовані зі зворотного боку кришки (як показано на рисунку).

ПРИМІТКА

Якщо ви підозрюєте, що вушна сірка чи бруд потрапили до мікрофона всередині слухового апарата, зверніться до фахівця з проблем слуху. **Не** вставляйте нічого в мікрофон.

Вентиляційний отвір

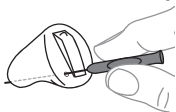

Короткий вентиляційний отвір: очистіть вентиляційний отвір настільки, наскільки дістає довгий кінець інструмента для видалення сірки (№ 4). Довгий вентиляційний отвір: очистуйте вентиляційний отвір щодня, повністю вставляючи довгий інструмент для видалення сірки (№ 3) в отвір. Коли слуховий апарат не використовується, відкрийте його для провітрювання.

ПРИМІТКА

Для продуктивної роботи слухового апарата вкрай важливо підтримувати чистоту вентиляційного отвору, очищувати його від сірки, бруду тощо. Очищуйте вентиляційний отвір після кожного дня користування апаратом. Якщо отвір забитий, зверніться до фахівця з проблем слуху.

Якщо апарат намокнув або ви відчуваєте, що спітніли, якнайшвидше просушіть його. Деякі користувачі застосовують спеціальні поглиначі вологи, наприклад Widex PerfectDry Lux, щоб підтримувати чистоту та сухість слухового апарата. Запитайте у свого фахівця з проблем слуху, чи підійде вам такий засіб.



У жодному разі не застосовуйте рідкі чи дезінфікуючі засоби для очищення слухового апарата.



Очищуйте й оглядайте слуховий апарат щодня після використання, щоб переконатися, що він не пошкоджений. Якщо слуховий апарат зламається в процесі носіння й у вушному каналі лишаться його невеликі фрагменти, зверніться до свого лікаря. У жодному разі не намагайтеся дістати фрагменти самостійно.


Фільтр для сірки

Фільтр захищає слуховий апарат від вушної сірки. Завжди використовуйте фільтр для сірки Widex у своєму слуховому апараті.

Заміна фільтра для сірки




Відкрийте футляр фільтра для сірки, як показано на рисунку.

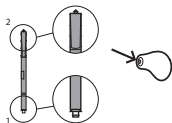


Фільтр для сірки складається з таких частин:


1. Зачіпка для видалення фільтра
2. Новий фільтр для сірки

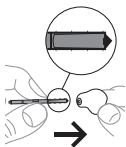


Вставте зачеп у використаний фільтр.

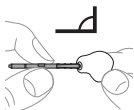


Утримуйте тримач під прямим кутом.

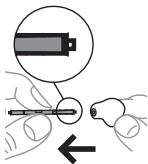


Витягніть використаний фільтр для сірки одним рухом.

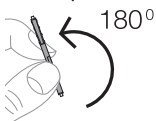

Вставте новий фільтр безпосередньо у звуковий отвір і злегка притисніть його.

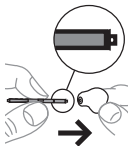

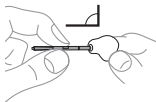

Витягніть тримаач одним рухом.



Проконсультуйтеся з фахівців із проблем слуху, наскільки часто слід змінювати фільтр для сірки.



Фільтр для сірки є одноразовим, він не підлягає чищенню.



Якщо фільтр для сірки встановлено занадто вільно, зніміть його та вставте новий.



Якщо фільтр для сірки випаде всередину вуха, зверніться до лікаря чи фахівця з проблем слуху, щоб він дістав фільтр. НЕ НАМАГАЙТЕСЯ дістати фільтр для сірки самостійно.

ПОШУК І УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

Ця інструкція містить поради на випадок, якщо слуховий апарат не працює взагалі або працює неправильно. Якщо проблему не вдалось усунути, зверніться до фахівця з налаштування слухових апаратів.

Проблема	Можлива причина	Вирішення
У слуховому апараті зовсім немає звуку	Пристрій не ввімкнено	Переконайтеся, що батарейка встановлена правильно, а кришка відсіку для батарейки щільно закрита.
	Батарейка не працює	Установіть нову батарейку в слуховий апарат
	Звуковий отвір заблоковано	Див. розділ, присвячений очищенню
	Отвір мікрофона заблоковано	Див. розділ, присвячений очищенню
Рівень гучності слухового апарата недостатній	Звуковий отвір заблоковано	Див. розділ, присвячений очищенню
	Вухо заблоковано вушною сіркою	Зверніться до лікаря
	Можливо, змінився ваш рівень слуху	Зверніться до фахівця з налаштування слухових апаратів/лікаря

Проблема	Можлива причина	Вирішення
У слуховому апараті постійний свист	Вухо заблоковано вушною сіркою	Зверніться до лікаря
	Вушний вкладиш не-правильно вставлено у вушний канал	Витягніть вушний вкладиш і вставте його заново
	Вушний вкладиш за-надто вільно розташований у вушному кана-лі	Зверніться до фахівця з налаштування слухових апаратів
Слуховий апарат не комфортно вставляти	Вушний вкладиш не-правильно вставлено у вушний канал.	Проконсультуйтеся з фахівцем із налаштування слухових апаратів
	Слуховий апарат не відповідає формі ва-шого вуха	Зверніться до фахівця з налаштування слухових апаратів

Проблема	Можлива причина	Вирішення
	Подразнення зовнішнього вуха або вушного каналу	Користувачам, які вперше використовують слуховий апарат, слід спочатку носити його не тривалий час. Заплануйте поступово звикнути до слухового апарата за 2–3 тижні. Якщо подразнення зберігається, зверніться до фахівця з налаштування слухових апаратів.

НОРМАТИВНО-ПРАВОВА ІНФОРМАЦІЯ

Заяви щодо відповідності вимогам Федеральної комісії зі зв'язку США (FCC) і Міністерства інновацій, науки та економічного розвитку Канади (ISED)

Federal Communications Commission Statement

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.

- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

NOTE:

Changes or modifications to the equipment not expressly approved by Widex A/S could void the user's authority to operate the equipment.

ISED Statement / Déclaration d'ISED

Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause interference.
- (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

- (1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
- (2) L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.



N26346

Інформація щодо утилізації

Не викидайте слухові апарати, аксесуари й батарейки до них разом зі звичайним побутовим сміттям.

Слухові апарати, батарейки та аксесуари до слухових апаратів потрібно здати в пункт прийому відходів електричного й електронного обладнання або передати фахівцю з налаштування слухових апаратів для безпечної утилізації.

СИМВОЛИ

Поширені символи, які використовуються Widex A/S для маркування медичних пристроїв (етикетки, інструкції з використання тощо).

Символ **Назва/опис**



Виробник

Товар виготовлено компанією, назву та адресу якої вказано поруч із символом. За потреби може бути вказана дата виготовлення.



Номер за каталогом

Номер товару (позиції) за каталогом.



Див. інструкцію з використання

Інструкція з використання містить важливу інформацію (попередження/заходи безпеки), тому уважно прочитайте її перед використанням товару.



Попередження

Текст, який слід прочитати перед використанням товару, позначено символом попередження.



Позначка WEEE

«Не слід викидати зі звичайними відходами». У разі викидання товару його слід передати в спеціальний пункт збору відходів для вторинної переробки та відновлення ресурсів. Це попередить шкоду навколишньому середовищу чи здоров'ю людей унаслідок дії небезпечних речовин.



Позначка CE

Товар відповідає вимогам директив Європейського Союзу щодо маркування CE.

Символ	Назва/опис
---------------	-------------------



	Позначка RCM
--	---------------------

	Товар відповідає вимогам електричної безпеки, електромагнітної сумісності та радіочастотного спектра, а також нормативним вимогам до продукції, яка постачається до Австралії чи Нової Зеландії.
--	--



Widex A/S

Nymoellevvej 6, DK-3540 Lyngby, Denmark
(Данія)

<https://global.widex.com>

CE 0123

**Номер
керівництва:**
9 514 0578 060 01
Видання:



2021-03

9 514 0578 060 01